



Sensomotorisch versorgen mit SensoMatch

Vielfalt mit System

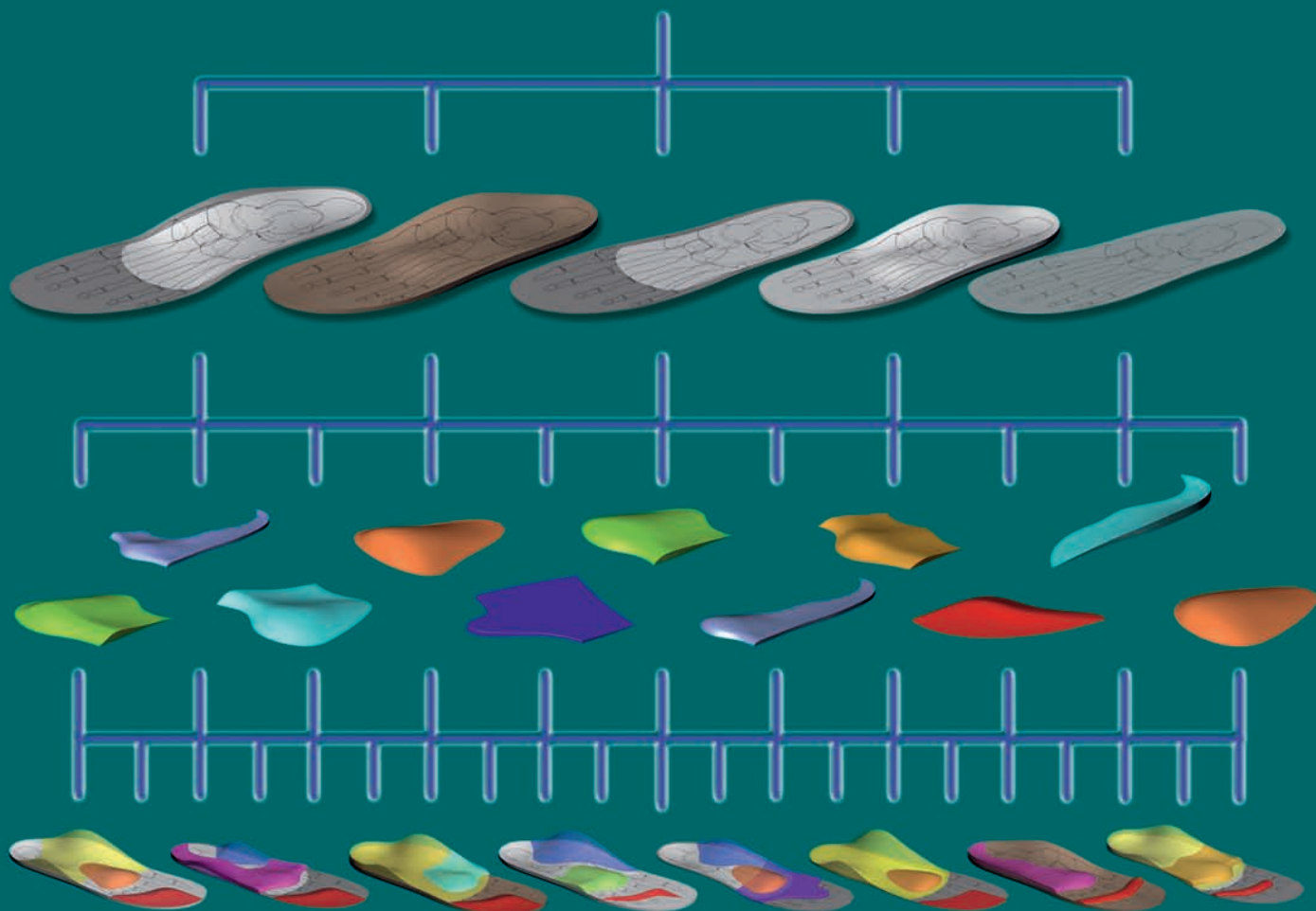

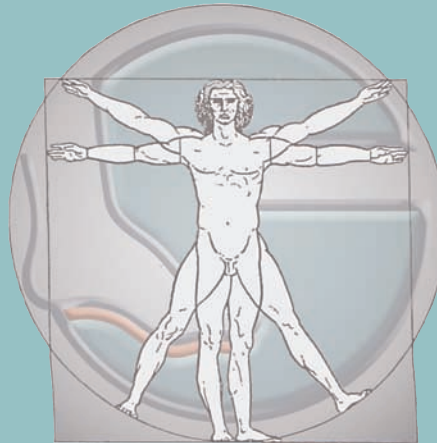

Informationsbroschüre der Firma



Herausgeber:
Franz Seidl GmbH
Orthopädie-Schuhtechnik
Roritzer Straße 4
93047 Regensburg
Telefon: 0941 51598
Telefax: 0941 5999741
E-Mail: info@schuh-seidl.de

Inhaltlich verantwortlich:
Rainer Rauch
Redaktionelle Gestaltung:
Presse Sollfrank
Fotos und Grafiken:
Thorsten Raab
Rebecca Sollfrank-Großmann
SciePro, Würzinger TV & Film
fotolia/ Vitalina Rybakova, sk_design
Gabor Schuhe
Titelgrafik: Thorsten Raab,
Rebecca Sollfrank-Großmann

Registergericht:
Amtsgericht Regensburg
Augustenstr. 3, 93049 Regensburg
Registernummer: HRB 3025
Zuständige Kammer:
Handwerkskammer Regensburg
Landesinnung München
- JK 340930016

Berufsbezeichnung:
Orthopädie-Schuhmachermeister,
Podologe verliehen
in der Bundesrepublik Deutschland
Berufsrechtliche Regelungen:
Handwerksordnung,
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003,
Teil 1, Nr. 66, Seite 2934

Vertretungsberechtigte
Geschäftsführer:
Rainer Rauch, Irmgard Rauch
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz:
DE 133700636

Stand: April 2017


Inhalt:	<u>Impressum</u>	<u>Seite 02</u>
	<u>Editorial</u>	<u>Seite 03</u>
	<u>Die Vorteile auf einen Blick</u>	<u>Seite 04</u>
	<u>Kundenzufriedenheit – ein Kinderspiel</u>	<u>Seite 05</u>
	<u>Basis: Die sechs verschiedenen Träger</u>	<u>Seite 06 + 07</u>
	<u>Das Material: Geniale Physiodynamik</u>	<u>Seite 08 + 09</u>
	<u>So einfach geht's: Die Verarbeitung</u>	<u>Seite 10 - 11</u>
	<u>Unsere SensoMatch-Elemente</u>	<u>Seite 12 - 21</u>
	<u>Unsere SensoSpange-Elemente</u>	<u>Seite 22 + 23</u>
	<u>Die SensoSpange – So funktioniert's</u>	<u>Seite 24</u>
	<u>Ideale Prävention: Umknickschutz</u>	<u>Seite 25</u>
	<u>Schmetterlinge im Fuß ...</u>	<u>Seite 26</u>
	<u>Einfach genialer EinlagenComfort</u>	<u>Seite 27</u>
	<u>DGUV 112 -191: Zertifizierung inklusive</u>	<u>Seite 28</u>
	<u>Versorgungsbeispiel Knick-Senk-Plattfuß</u>	<u>Seite 29</u>
	<u>Versorgungsbeispiel Hohlfuß</u>	<u>Seite 30</u>
	<u>Versorgungsbeispiel Hohl-Knickfuß</u>	<u>Seite 31</u>
	<u>Versorgungsbeispiel Spreizfuß</u>	<u>Seite 32</u>
	<u>Versorgungsbeispiel Hallux Valgus/Rigidus</u>	<u>Seite 33</u>
	<u>Versorgungsbeispiel Achillodynie</u>	<u>Seite 34</u>
	<u>Versorgungsbeispiel Fersensporn</u>	<u>Seite 35</u>
	<u>Impressionen der Versorgungs-Vielfalt</u>	<u>Seite 36 - 39</u>
	<u>Kontakt Daten</u>	<u>Seite 40</u>

Der Joker in Ihrem Versorgungsspiel

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

**drei ganz klare Trends zeichnen
sich in unserer Branche ab:**

- **Wir wollen unsere Kunden
individuell sensomotorisch versorgen.**
- **Wir suchen nach immer dünneren
Einlagenmodellen für alle Schuharten.**
- **Wir brauchen unkomplizierte Lösungen,
die für jeden schnell umsetzbar sind.**

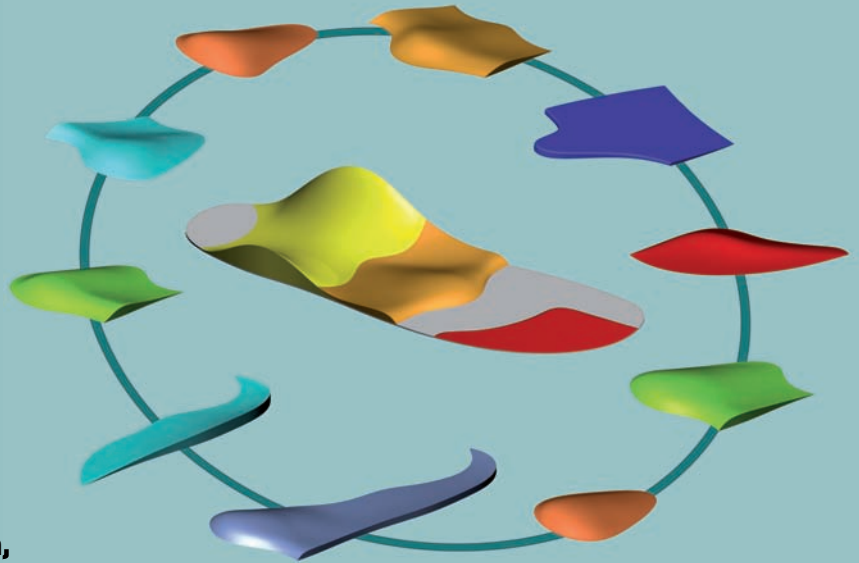

Unsere Antwort auf diese Ziele:

SensoMatch – die spielend leichte Lösung für hochindividuelle sensomotorische Einlagen.

Mit SensoMatch wird der individuelle Einlagenbau aufs Wesentliche reduziert. Das intelligente Baukastensystem verfügt über eine Reihe von Trägern mit unterschiedlichen Eigenschaften. Auf diese Träger können zahlreiche Elemente kundenpassgenau fixiert werden.

Dank des physiodynamischen PU-Spezialmaterials von SensoMatch können die einzelnen Elemente ultradünn verarbeitet werden, ohne ihre hohe Rückstellfähigkeit und sensomotorische Wirkung zu verlieren.

Sie suchen sich aus dem SensoMatch-System einfach die Einzelelemente, die Sie brauchen, und bauen eine handwerkliche sensomotorische Einlage, die wirklich passt.

Herzlichst Ihr Rainer Rauch

Einfach anders – einfach durchdacht

SensoMatch ist von der Branche für die Branche gemacht – und deshalb eine echte Innovation

Handwerkliche Fertigung
sensomotorischer Einlagen
in hoher Qualität
auf das Wesentliche vereinfacht

Zeitgewinn trifft auf Individualität
und hohen eigenen Einfluss
auf das Ergebnis

Grenzenlose Versorgung
für jeden Fuß und Schuh

Auswahl von sechs verschiedenen
Träger-Varianten zur
individuellen Versorgung
von verschiedenen Schuhtypen

Zahlreiche, frei kombinierbare
Einzelelemente in verschiedenen Größen

Elemente aus physiodynamischem
Spezial-PU mit extrem hoher Rückstellfähigkeit
und dauerhafter Stabilität

Sensomotorische Wirksamkeit
auch bei ultradünner Verarbeitung

Direktes Ausrichten der Elemente
auf der Trittspur möglich

Halbsohlige Lösungen möglich




Kundenzufriedenheit? – Ein Kinderspiel

Hochindividuelle sensomotorische Einlagenversorgung muss nicht kompliziert sein.

- Sie würden Ihre Kunden gerne individuell sensomotorisch versorgen, aber die klassischen Wege sind zu aufwändig, arbeitsintensiv und zu teuer – und sie verfehlen oft ihr Einsatzziel?
- Sie möchten ein hochmodernes Ergebnis, das Ihrem Kunden exakt passt, aber Sie wollen handwerkliche Kontrolle und die Entscheidung über den Produktcharakter?

Dann ist SensoMatch die ideale Lösung für Sie.

- Dank sechs verschiedener Träger-Varianten können Sie jeden Schuh versorgen und individuell auf die Nutzungsbedürfnisse Ihres Kunden eingehen.
- Wählen Sie in der Grundausstattung aus mehr als 40 Elementen die passende Kombination.
- Das physiodynamische SpezialPU des SensoMatch-Systems lässt sich zur ersten Passformkontrolle mit ein wenig Kleber oder doppelseitigem Klebeband fixieren und leicht wieder für Positionskorrekturen ablösen.
- Der fertig geklebte Rohling kann problemlos sauber verschliffen und millimeter genau nachbearbeitet bzw. angepasst werden.
- Nach wenigen Schritten verfügen Sie über eine individuelle sensomotorische Einlage, deren Wirkung und Tragekomfort Sie am Kunden noch einmal austesten können, bevor Sie sie mit der Decke beziehen.
- Dank SensoMatch geht in Zukunft jede Ihrer Einlagen als handwerklich gefertigte Individualeinlage mit hoher sensomotorischer Wirkung über den Lадentisch.

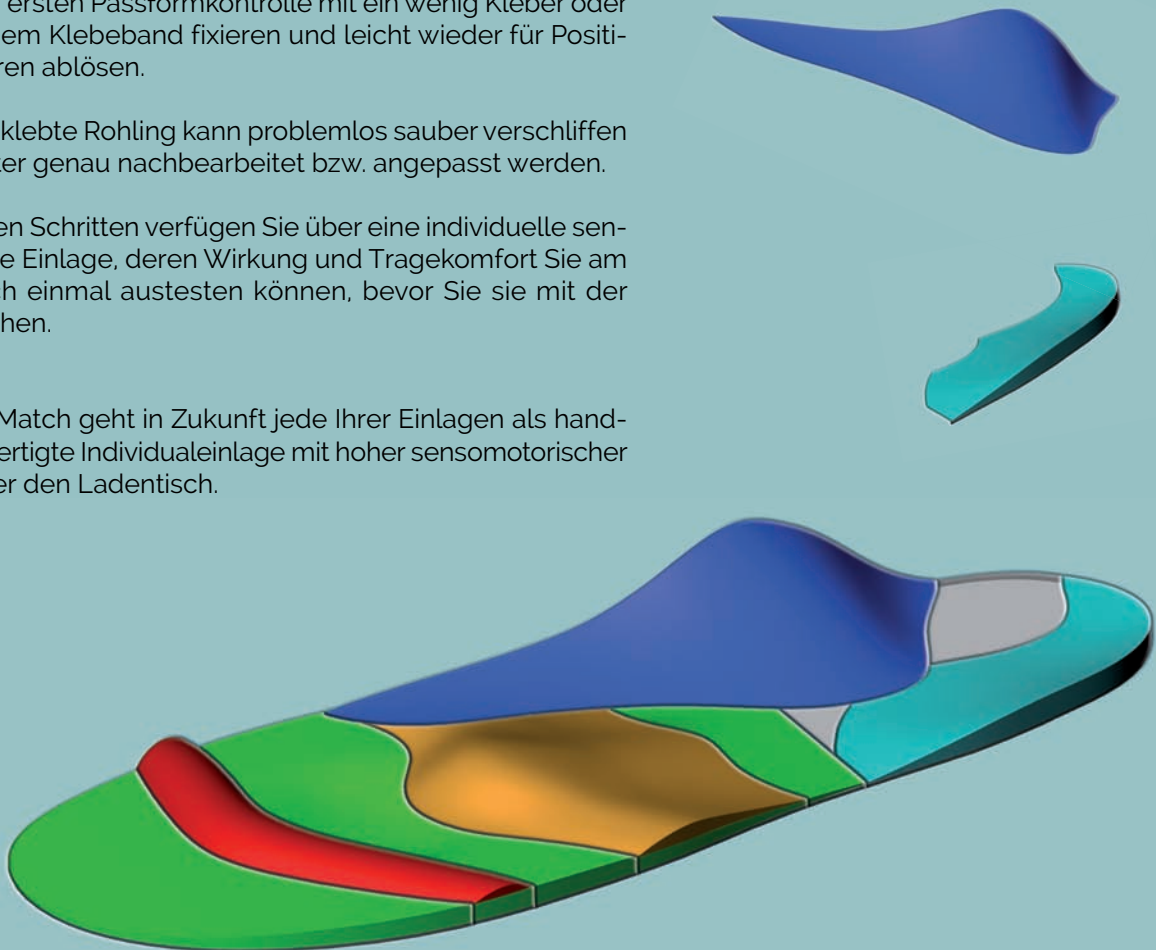

Ihre Entscheidung!

Von der superdünnen PurFlex Folie bis zum 5-mm-Kork haben Sie bei SensoMatch 6 Träger zur Auswahl. Das bietet verschiedene Stärkenvariablen ohne Einschränkung der Stabilität und Funktion. Die Materialvarianten können je nach Schuhart und Kundenvorlieben eingesetzt werden.

PurFlex Folie Superdünn, 1 Millimeter

Einsatzgebiet: Schuhe mit wenig Platz wie Pumps oder Fußballschuhe

Vorteile:

- nur 1 mm Unterbau unter Ferse und Vorfuß
- erstmals sensomotorische Vollversorgung ohne Platzverlust im Schuh




Bestellnummer: PF

PurFlex Folie mit Verstärkungskern im Rückfuß, Superdünn, 1 Millimeter

Einsatzgebiet: Schuhe mit wenig Platz wie Pumps oder Fußballschuhe

Vorteile:

- nur 1 mm Unterbau unter Ferse und Vorfuß
- erstmals sensomotorische Vollversorgung ohne Platzverlust im Schuh

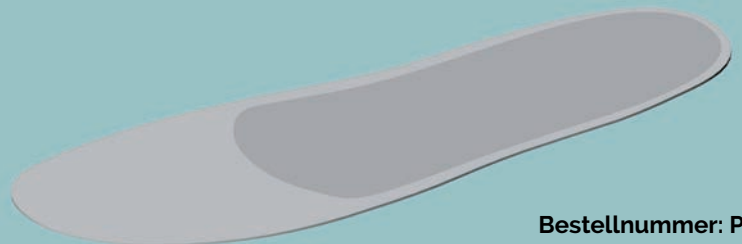


Bestellnummer: PFV

SensoTec o mit Verstärkungskern (0,5 mm Vorfußstärke)

Einsatzgebiet: Schuhe mit wenig Platz wie Pumps oder Fußballschuhe

Vorteile:

- leichte, aber stabile Filzkartonkonstruktion
- nur 0,5 mm Unterbau unter Ferse und Vorfuß
- keine Absatzsprengung
- erstmals sensomotorische Vollversorgung ohne Platzverlust im Schuh

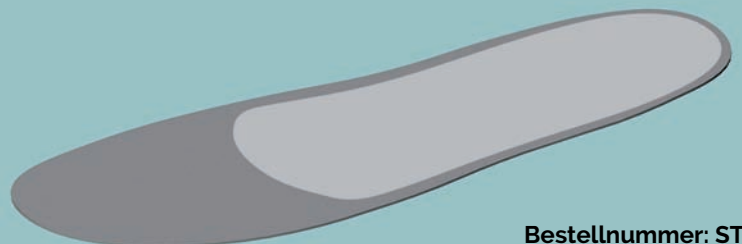

Bestellnummer: SToV


Ihre Entscheidung!

SensoTec mit Verstärkungskern (0,5 mm Vorfußstärke)

Einsatzgebiet: Schuhe mit wenig Platz wie
Pumps oder Fußballschuhe

Vorteile:

- leichte, aber stabile Filzkartonkonstruktion
- nur 0,5 mm Unterbau unter Ferse und Vorfuß
- Absatzsprengung passt sich an Höhenniveau in Schuh an
- erstmals sensomotorische Vollversorgung ohne Platzverlust im Schuh

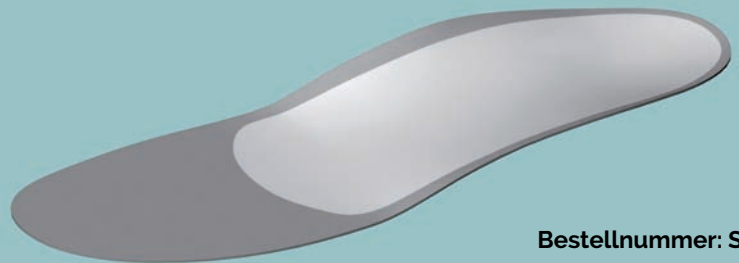

Bestellnummer: STV

EVA-Träger, 5 mm

Einsatzgebiet: Bequemschuhe und Schuhe mit dickem,
auswechselbarem Fußbett,
ideale Passform in FinnComfort

Vorteile:

- Klassische Versorgung für gängige Schuharten
- Gewohnte Bearbeitungsmöglichkeiten



Bestellnummer: EVA5

Kork-Träger, 5 mm

Einsatzgebiet: Bequemschuhe und Schuhe mit dickem,
auswechselbarem Fußbett
ideale Passform in FinnComfort

Vorteile:

- Klassische Versorgung für gängige Schuharten
- Gewohnte Bearbeitungsmöglichkeiten
- erhöhte Stabilität und Festigkeit



Bestellnummer: K7



Das Material: Punkten mit Physiodynamik

Die Qualität der Einlagenversorgung steht und fällt mit ihrer Wirksamkeit. Beim SensoMatch-System steckt die Wirkung schon im Material. Das Spezial-PU hat zahlreiche positive Eigenschaften.

- sehr formstabil
- extrem rückstellfähig
- hochflexibel
- wirksam auch in 1 mm Dicke
- durchgehend homogen
- zertifiziert für namhafte Sicherheitsschuhe

Das physiodynamische Material der SensoMatch-Elemente löst eine Korrektur des biomechanischen Bewegungsablaufs im Fuß aus:

- > Der Rückfuß wird aufgerichtet und stabilisiert.
 - > Die Abrollbewegung wird über den äußeren Mittelfuß zurück zur Großzehe geleitet.
 - > Muskellängen und Toni der Fußmuskeln werden ausgeglichen.
 - > Das Material lässt den Fuß bei Belastung eintauchen und springt bei Entlastung zurück an den Fuß.
 - > So entsteht ein permanenter sensomotorischer Korrekturimpuls.



Die Regulierung des Systems Fuß führt zu einer Neuausrichtung der Körperstatik über das Skelett, das Sehnen- und Bändersystem und die Muskulatur. Das Zentrale Nervensystem erkennt ein neues Bewegungsmuster und speichert es als gesund ab. Die Gelenke arbeiten biomechanisch korrekt und ohne vorzeitige Abnutzung.

Das Material: Revolutionäre Bearbeitung


Der Knackpunkt bei einem Versorgungssystem wie SensoMatch ist das Ausgangsmaterial. Bisher übliche Schaumlatex-Systeme haben mehrere Nachteile:

- Eine individuelle Korrektur ist nicht mehr möglich, da durch Anschleifen der Latexhaut die Stabilität verloren geht.
- Ein nachträgliches Abziehen und Neupositionieren der Elemente ist nicht möglich.

Das Spezial-PU des SensoMatch-Systems ...

- ist ein durchgehend homogenes Material, das sich in jeder erdenklichen Weise weiterbearbeiten lässt, ohne einen Qualitätsverlust zu riskieren.
- hat gleichzeitig so viel Flexibilität und Rückstellkraft, dass es auch in 1 Millimeter Dicke seine impulsgebende Wirkung nicht verliert.
- klebt auch ohne Aufrauen praktisch auf jedem Untergrund.
- kann auf sehr glatten Untergründen lediglich durch materialverlustfreies Anrauen mit der roten Filzscheibe in der Haftung optimiert werden.
- muss auf der Oberseite vor Verkleben der Decke nicht mehr bearbeitet werden.
- ist fräsbearbeitbar, schleifbar und polierbar.


Alle SensoMatch-Elemente laufen auf Null übergangsfrei ineinander!

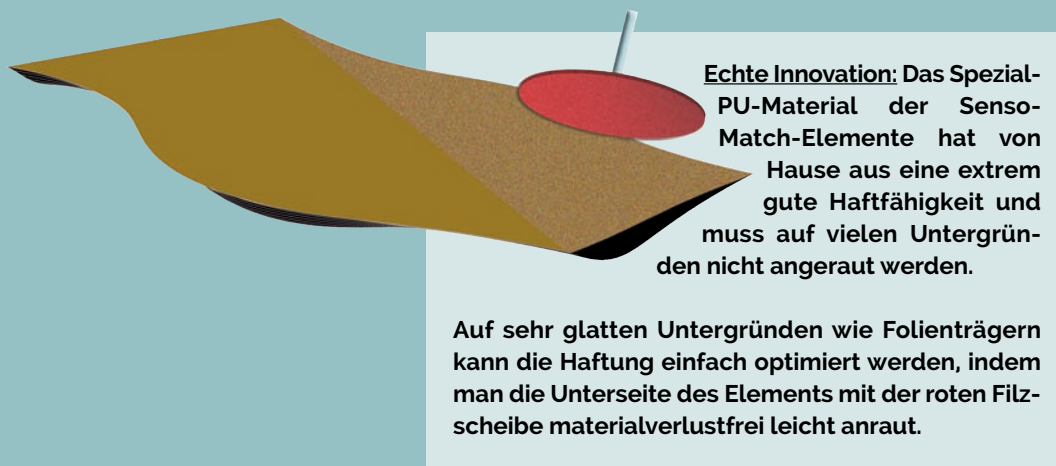


1, 2, 3 – Versorgung ist keine Zauberei!

So einfach geht der sensomotorische Einlagenbau mit SensoMatch: In wenigen Schritten steht die Versorgungsidee. Und die Weiterverarbeitung geht schnell und bequem.


1. Träger wählen.

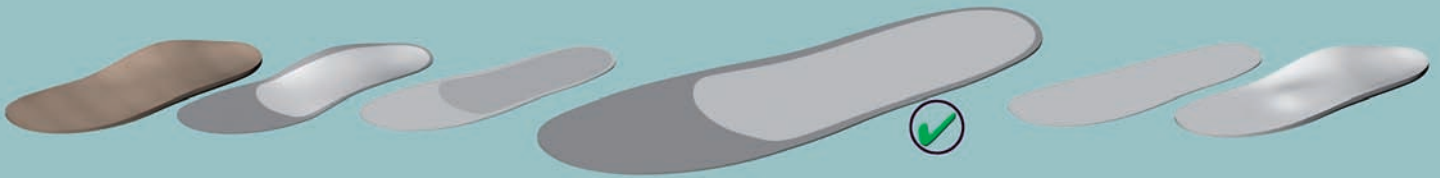

2. Rückfuß wählen.

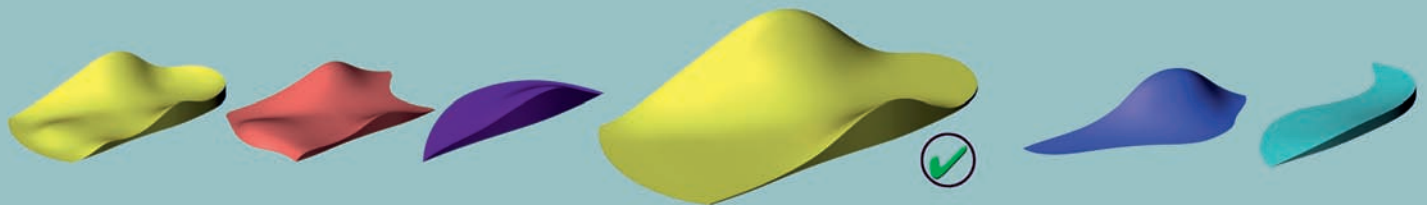

3. Pelotte wählen.

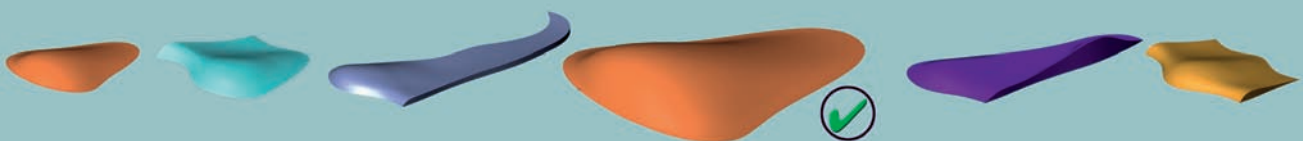

4. Zehensteg wählen.




Ultraschnell zur Individualversorgung


Das SensoMatch-System mit seinen verschiedenen Trägern und der großen Auswahl an Elementen ermöglicht jedem Orthopädie-schuhtechniker eine ultraschnelle, einfache und dabei hochindividuelle sensomotorische Einlagenversorgung.

Nach nur wenigen Schritten ist die Einlage konzipiert (siehe Seite 10).

Die individuelle Anpassung an die Kundenbedürfnisse ist ebenso simpel.

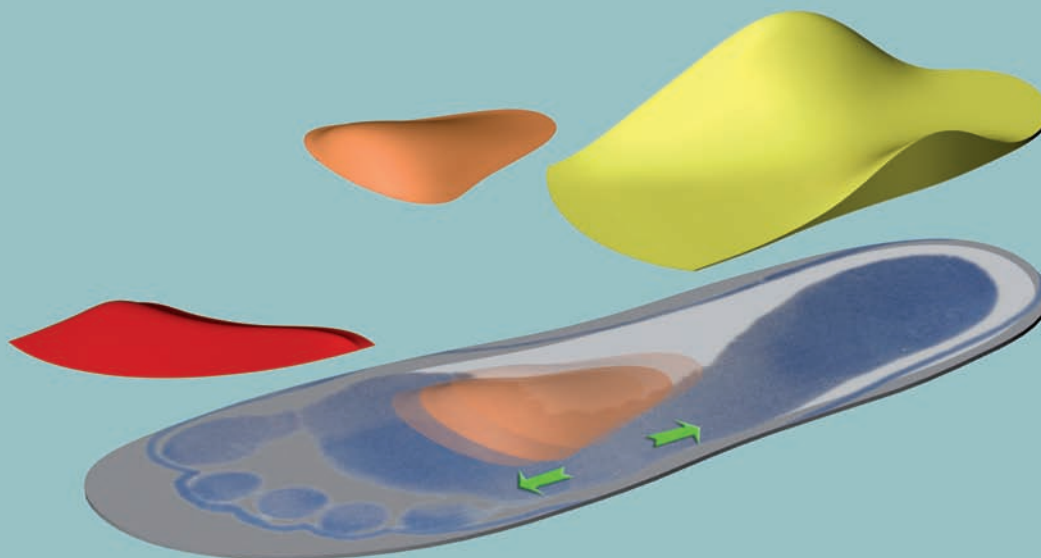

- Vorläufige Position der Elemente auf Basis von Blauabdruck/Scan.
- SensoMatch-Elemente reversibel fixieren.
- Positionstest der Elemente am Kundenfuß und Korrektur.
- Elemente endgültig fest verkleben.
- Passformtest am Kundenfuß mit eventueller Nachkorrektur durch Fräsen, Schleifen, Polieren.
- Aufziehen der Decke.

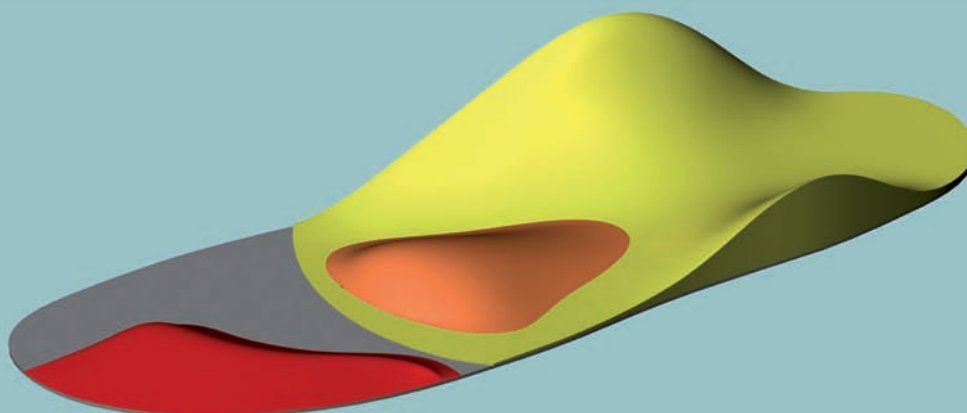


SensoMatch-Elemente



Zehensteg Z1

erhältlich in den Größen


S
M
L

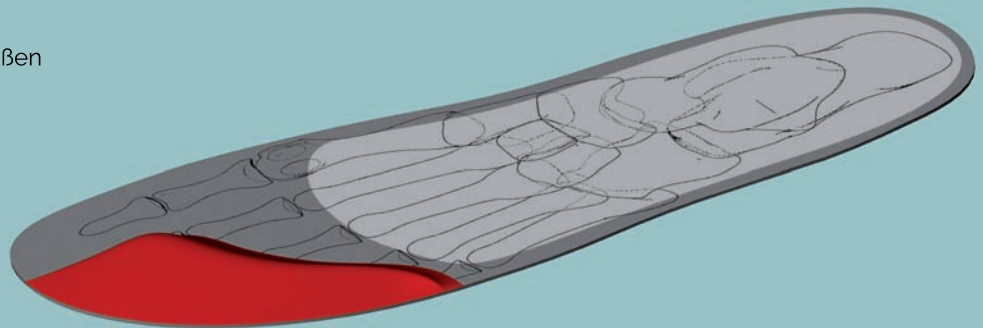

Zehensteg Z2

erhältlich in den Größen


S
M
L

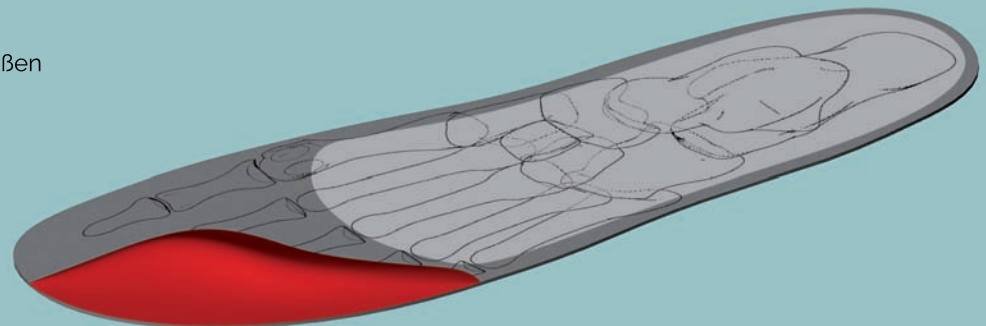

Zehensteg Z3

erhältlich in den Größen


S
M
L

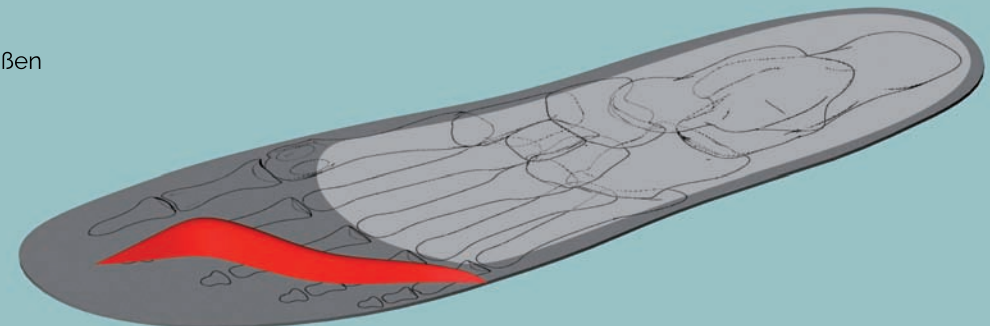

Zehensteg Z4

erhältlich in den Größen

S
M
L

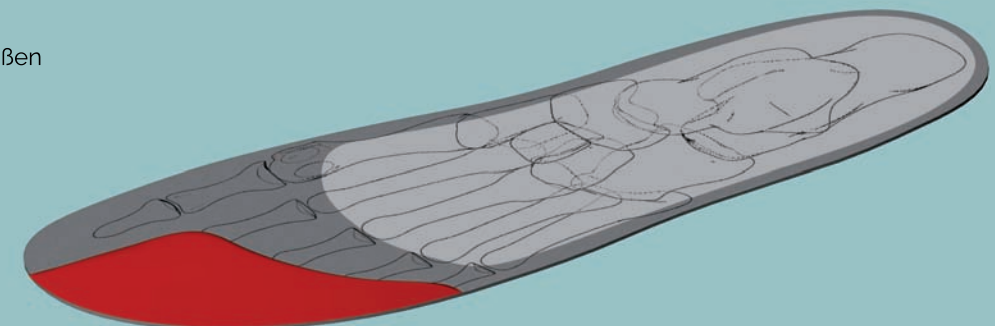


SensoMatch-Elemente



Zehensteg Z5

erhältlich in der Größe

M

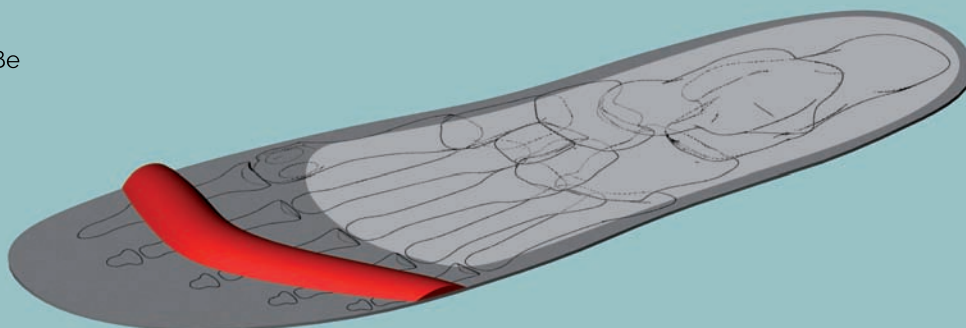


Zehensteg Z6

erhältlich in den Größen

M

L

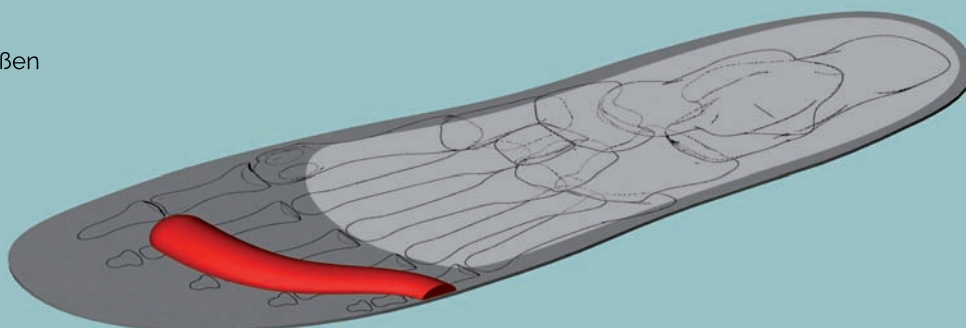


Zehensteg Z7

erhältlich in den Größen

M

L

mit integrierter
Pronation

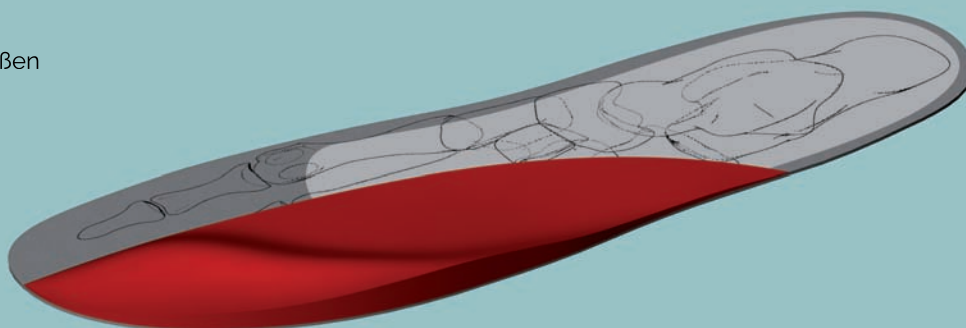


Zehenentlastung ZE1

erhältlich in den Größen

M

L

ideal für Hallux
Rigidus und stark
kontrakte
Krallenzehen

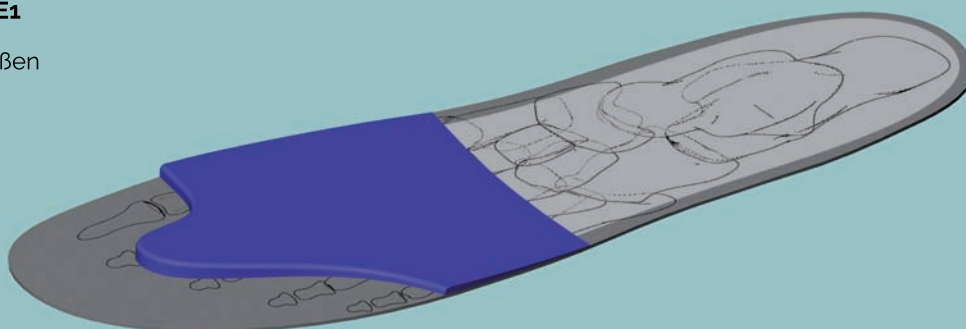


SensoMatch-Elemente



Vorfußpronation LG5

erhältlich in der Größe

M

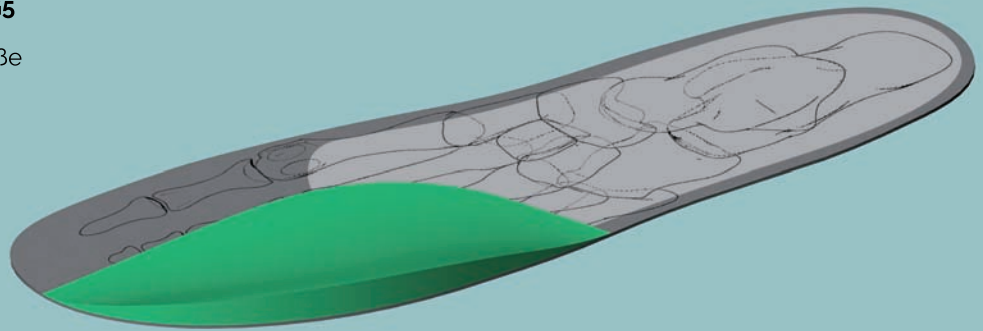


Schmetterlingsrolle SR1

erhältlich in der Größe

M


ideale Kombination
auf Einlage oder
im Schuh

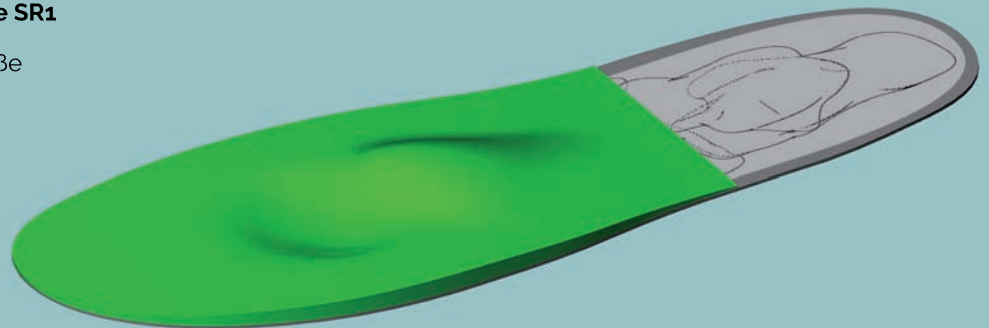

Pelotte P1

erhältlich in den Größen


S
M
L

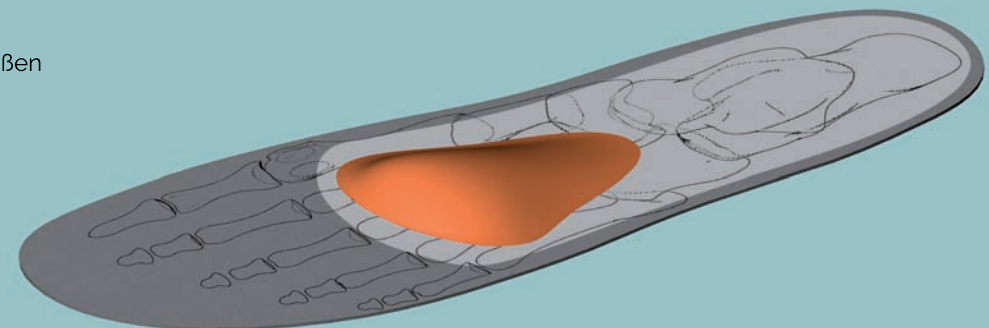

Pelotte P2

erhältlich in den Größen

S
M
L

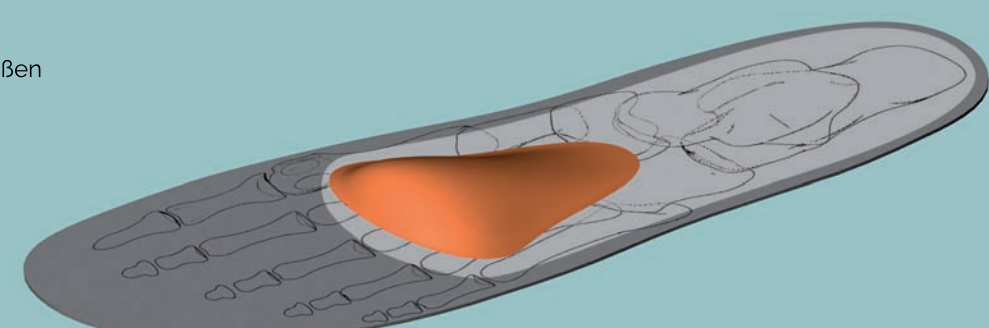


SensoMatch-Elemente



Pelotte P3

erhältlich in den Größen


S
M
L

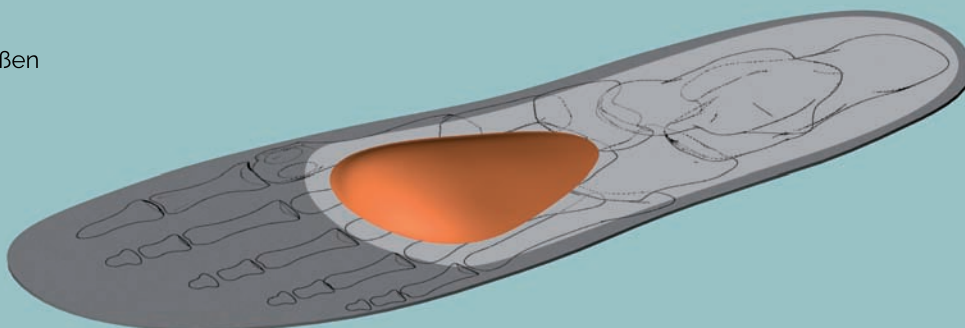

Pelotte P4

erhältlich in der Größe


M

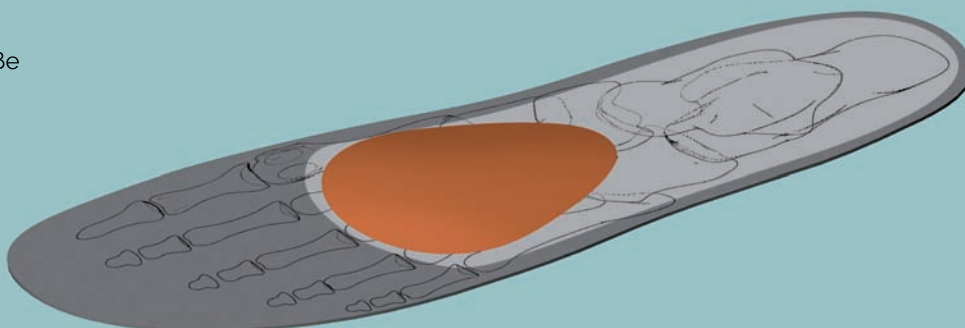

Außenpelotte AP1

erhältlich in den Größen


S
M
L

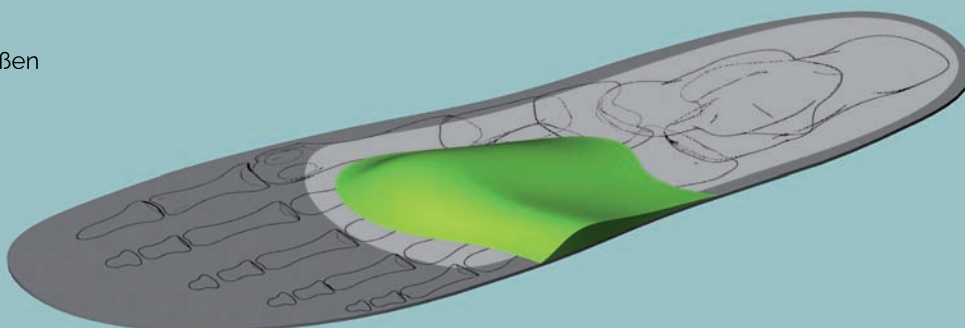

Außenpelotte AP2

erhältlich in den Größen

S
M
L

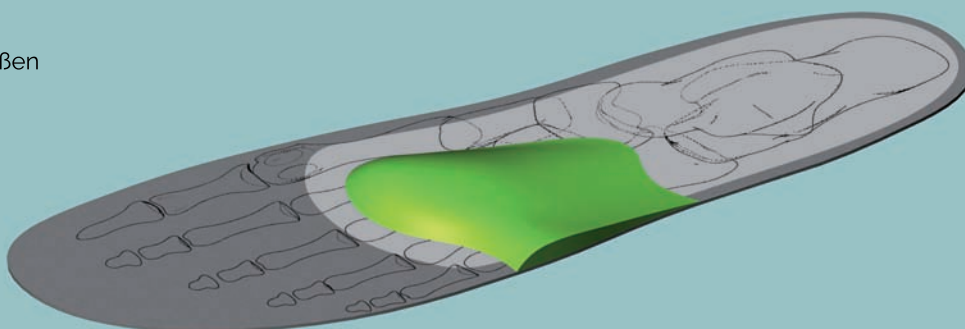


SensoMatch-Elemente



Außenpelotte AP3

erhältlich in den Größen



S
M
L

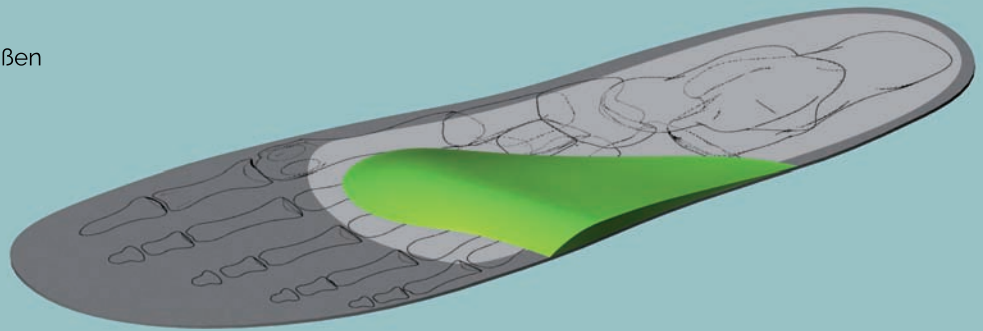

Halluxpelotte HP1

erhältlich in den Größen



S
M
L

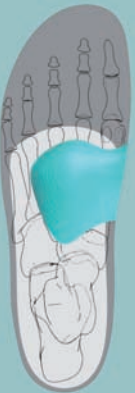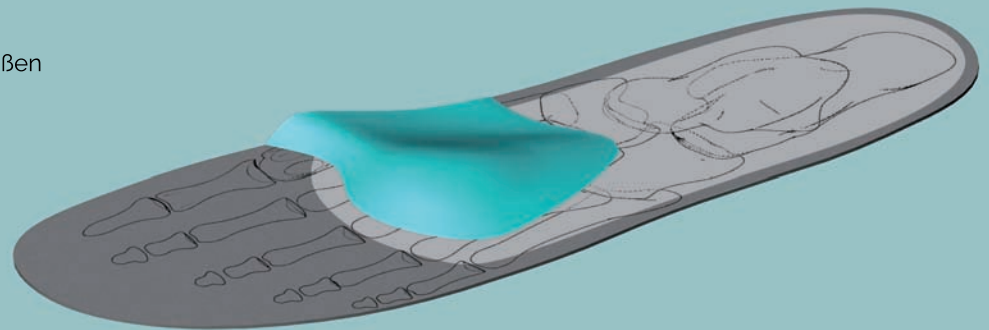

Halluxpelotte HP2

erhältlich in den Größen


S
M
L

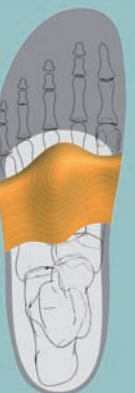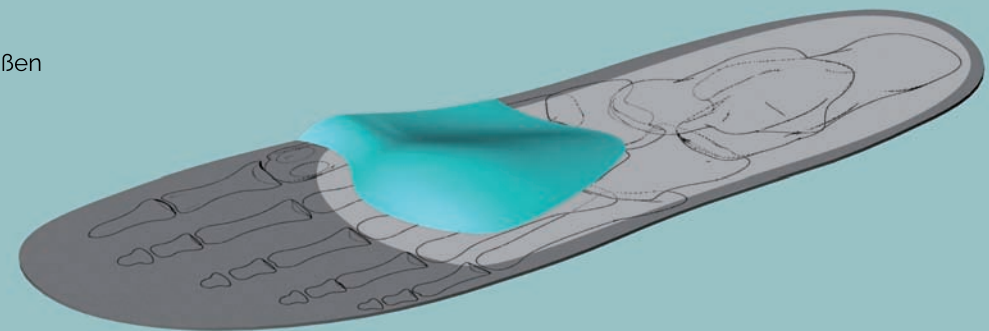

Retro R1

erhältlich in den Größen

S
M
L

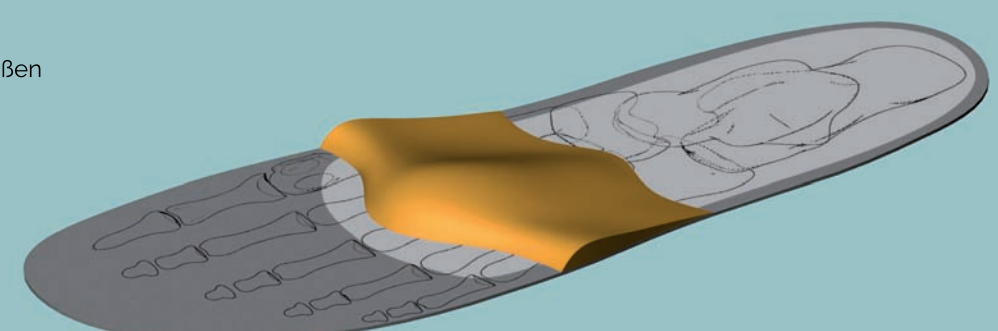


SensoMatch-Elemente



Retro R2

erhältlich in den Größen


S
M
L

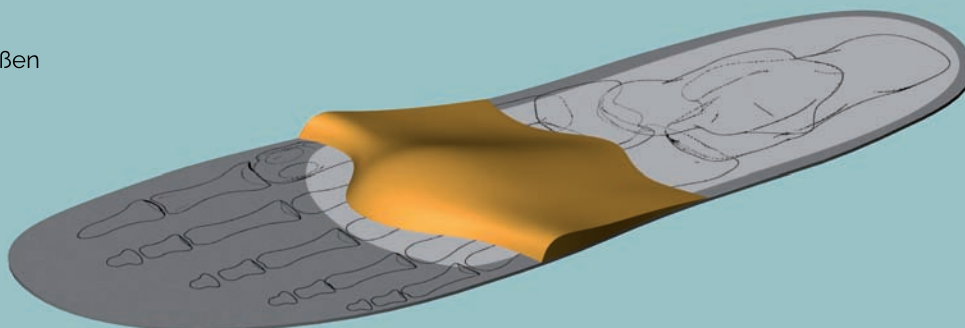

Retro R3

erhältlich in den Größen


S
M
L

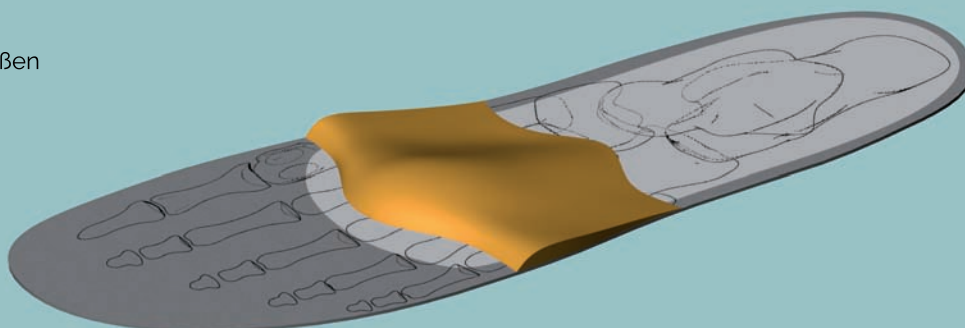

Retro R4

erhältlich in den Größen

S
M
L

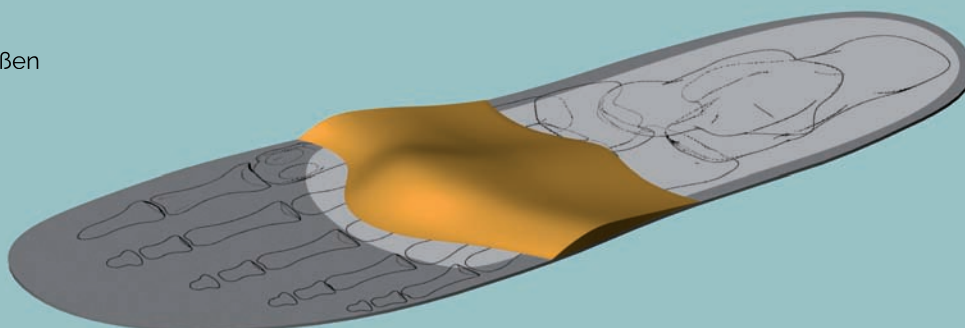


Hohlfußelement HE1

erhältlich in der Größe

M

ideale Entlastung der
Mittelfußköpfchen
und Aufdehnung
des kompletten
Mittelfußes;
wirkt stabilisierend

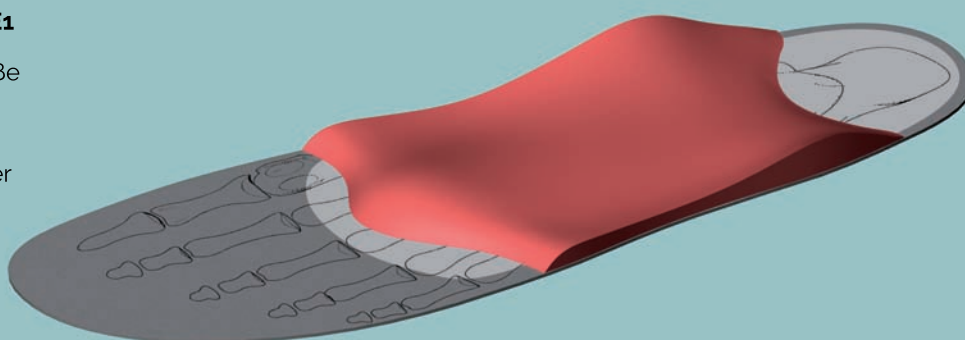

SensoMatch-Elemente




Hohlfußelement HE2

erhältlich in der Größe

M

ideale Entlastung der Mittelfußköpfchen und Aufdehnung des kompletten Mittelfußes; wirkt stabilisierend

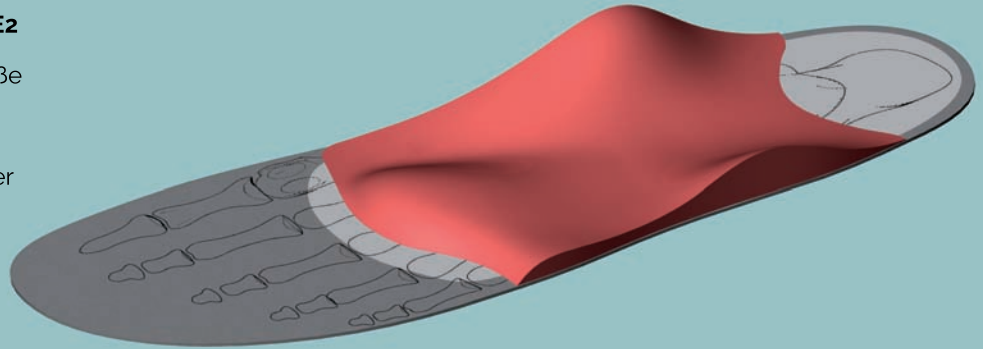


Außenkippung Pelotte AKP1

erhältlich in den Größen

M

L

Außenpelotte mit integrierter Fersenpronation führt zu optimalem Abrollvorgang über die Großzehe

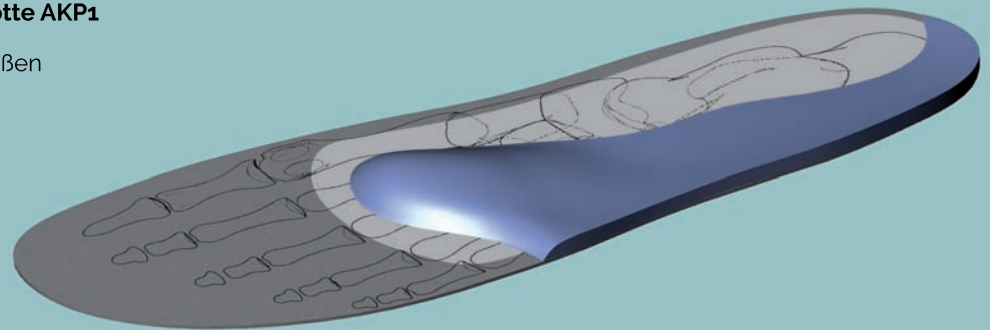


Außenkippung Retro AKR1

erhältlich in den Größen

M

L


ideale Ergänzung für Hohlfuß; Fersenpronation mit retrokapitaler Vorfußentlastung

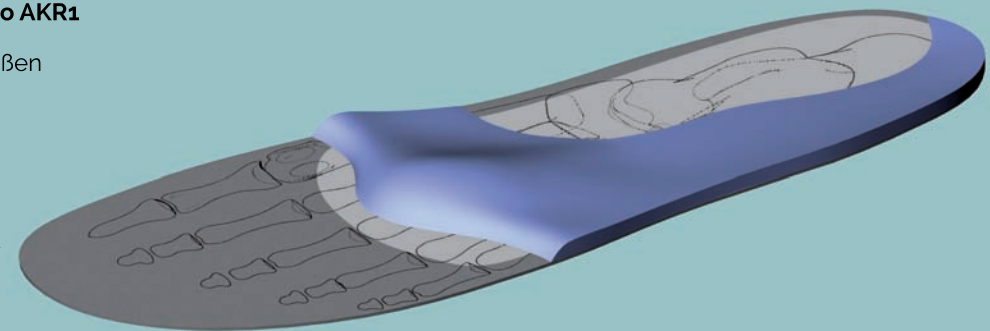

Längsgewölbe LG1

erhältlich in der Größe

M

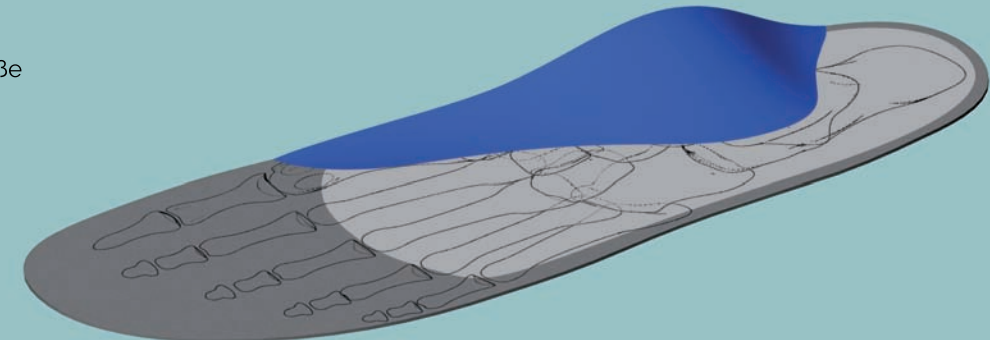


SensoMatch-Elemente



Längsgewölbe LG2

erhältlich in der Größe


M

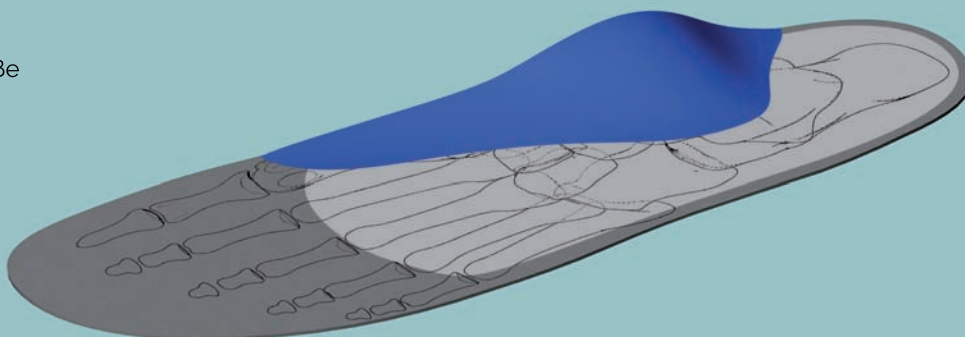

Längsgewölbe LG3

erhältlich in der Größe


M

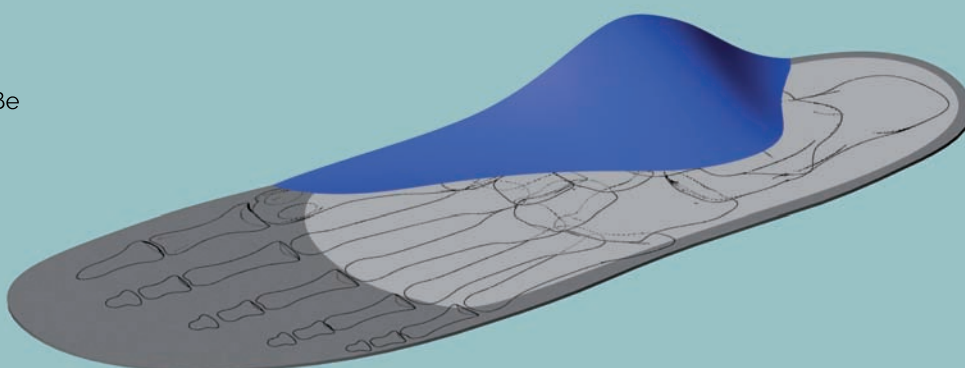

Längsgewölbe LG4

erhältlich in der Größe

M

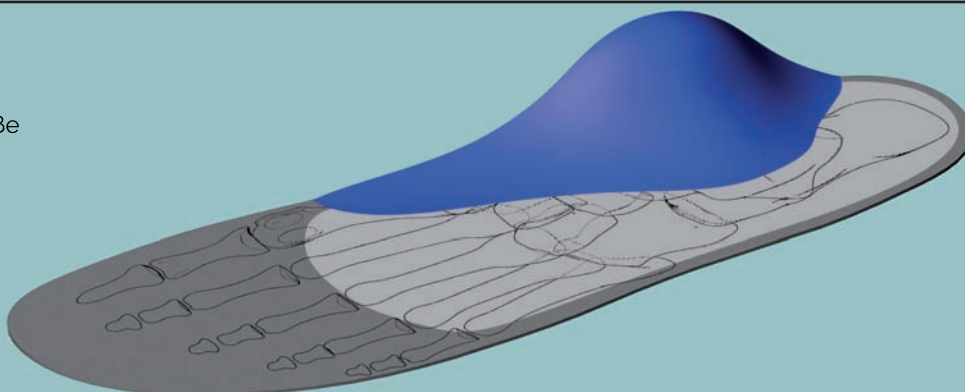


Längsgewölbe LG5

erhältlich in der Größe

M

Erhöhungselement
(5 - 8 mm) für
Längsgewölbe

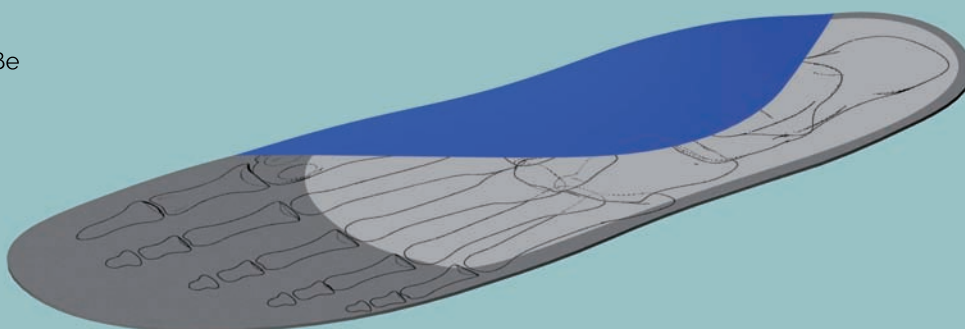


SensoMatch-Elemente



Peronäusstütze PS1

erhältlich in den Größen


M
L

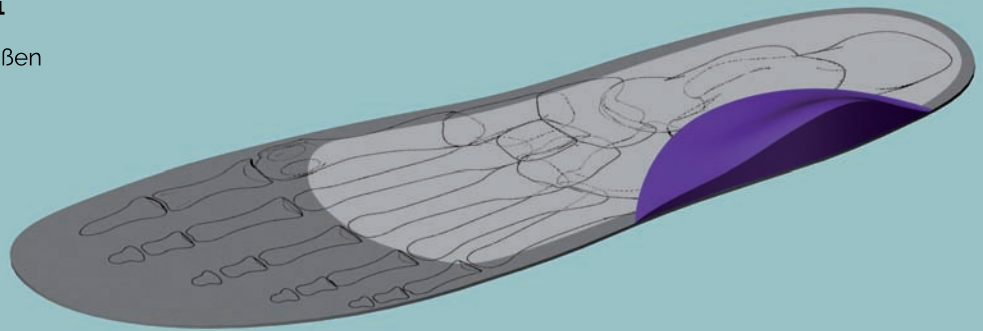

Peronäusstütze PS2

erhältlich in den Größen



M
L

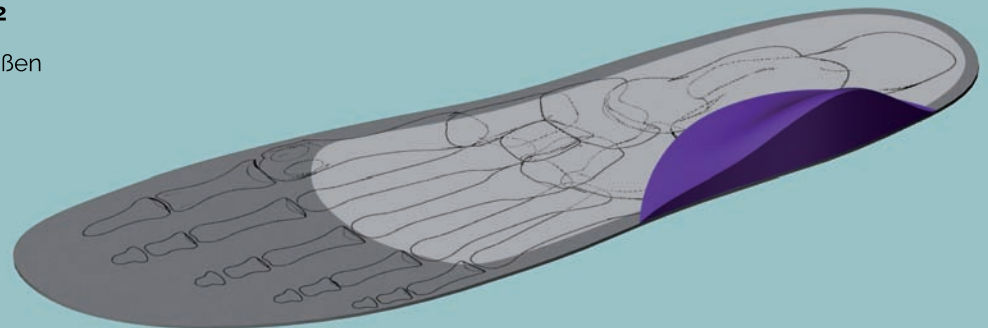

Peronäusstütze PS3

erhältlich in den Größen

M
L

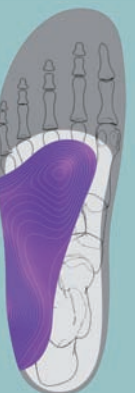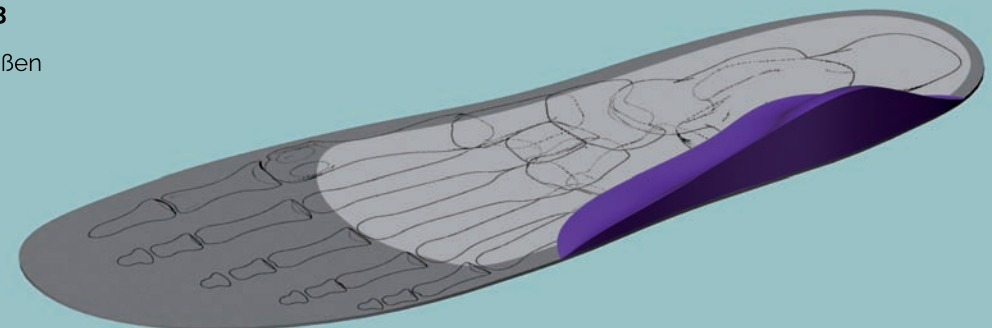


Peronäusstütze PS4

erhältlich in den Größen

M
L

mit integrierter Pelotte
mit Außenstufe

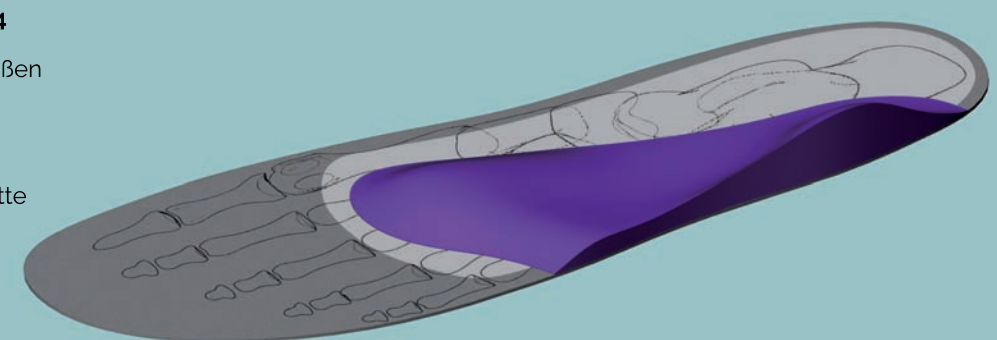


SensoMatch-Elemente



Fersenkipfung FK1

erhältlich in der Größe


M

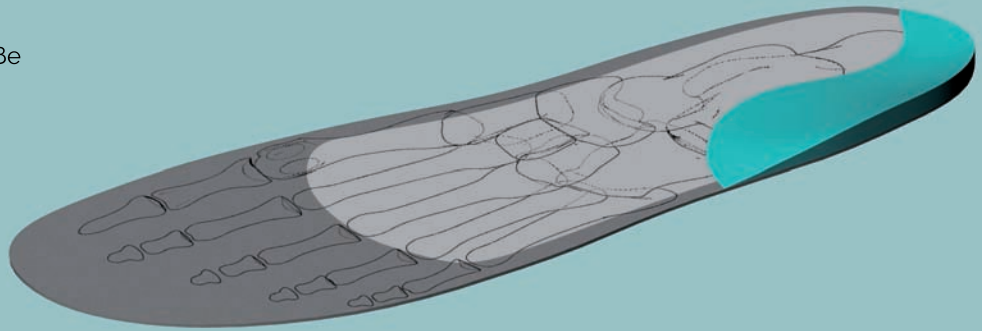

Fersenkipfung FK2

erhältlich in der Größe


M

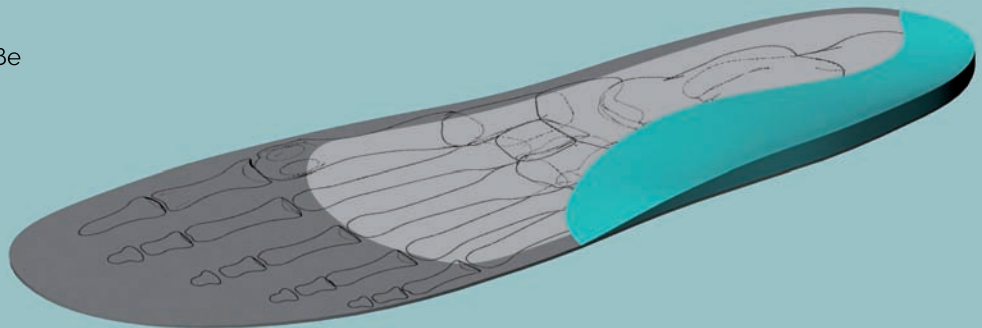

Fersenkipfung FK3

erhältlich in der Größe

M

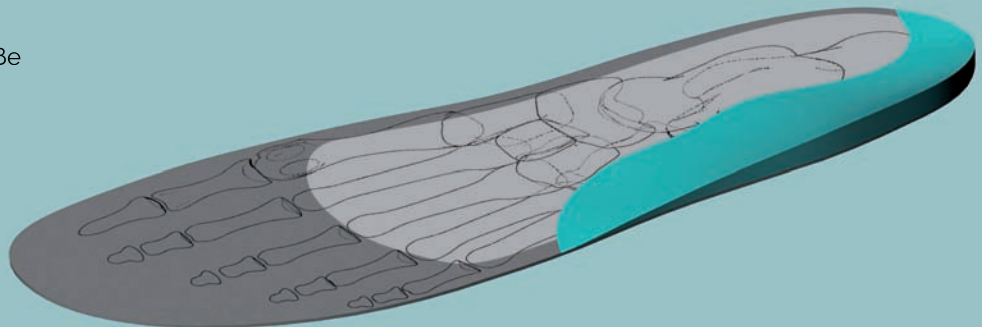

SensoSpange -Elemente




Spange Typ1 (konkav)

erhältlich in den Größen

36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

für alle Schuhe
mit wenig Platz;
optimale
Stabilisierungsschlinge
zwischen Peronäus
Longus und Tibialis
Posterior (Steigbügeleffekt);
idealer Umknickschutz

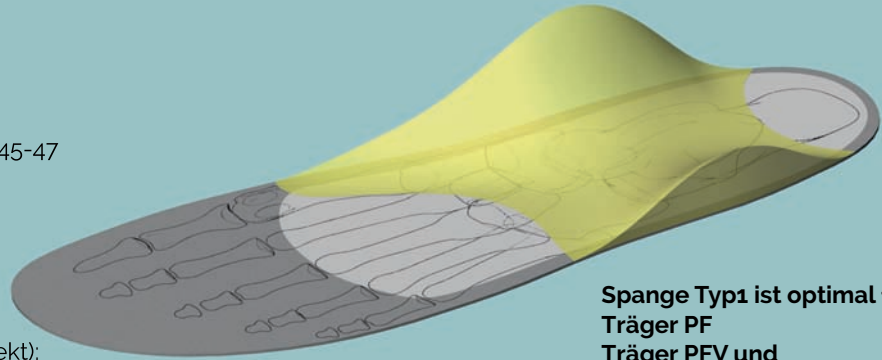

**Spange Typ1 ist optimal für
Träger PF
Träger PFV und
Träger SToV geeignet.**




Spange Typ2 (konkav)

erhältlich in den Größen

36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

für alle Schuhe
mit wenig Platz;
optimale
Stabilisierungsschlinge
zwischen Peronäus
Longus und Tibialis
Posterior (Steigbügeleffekt);
idealer Umknickschutz

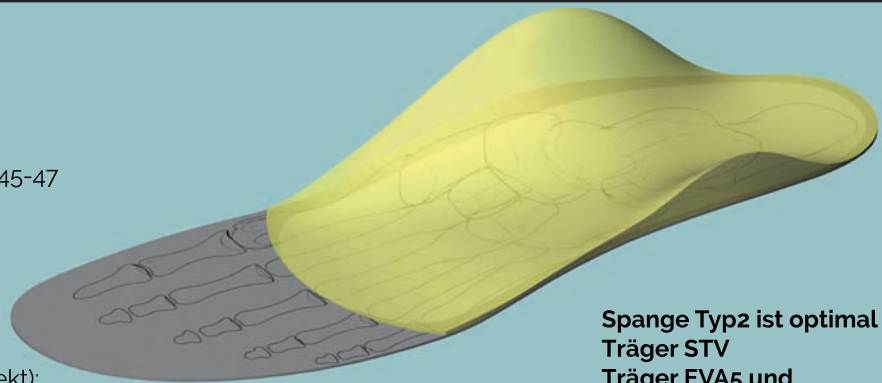

**Spange Typ2 ist optimal für
Träger STV
Träger EVA5 und
Träger K7 geeignet.**




Spange Typ3 (konkav)

erhältlich in den Größen

36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

Fersenklammer mit
integrierter Schale;
ideal zur Stabilisierung
des Rückfußes und
Korrektur des
Knickfußes, von
Achillodynie;
Fuß wird ins korrekte Lot gestellt

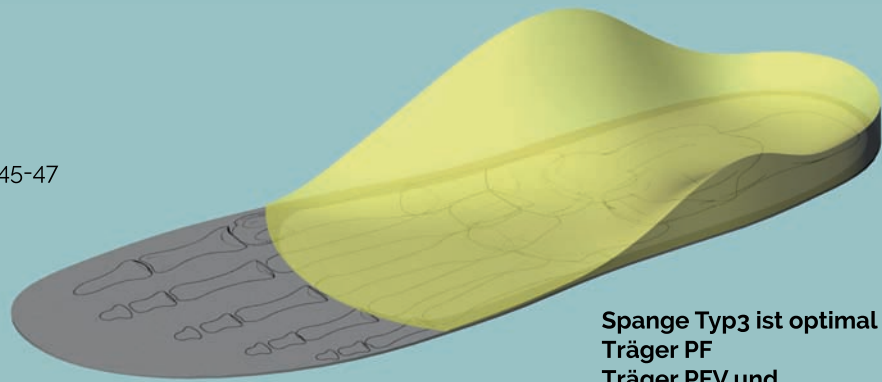

**Spange Typ3 ist optimal für
Träger PF
Träger PFV und
Träger SToV geeignet.**




Spange Typ4 (konvex)

erhältlich in den Größen


36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

Stabilisierung und
Aufrichtung des
Rückfußes;
ideal bei Knickfuß

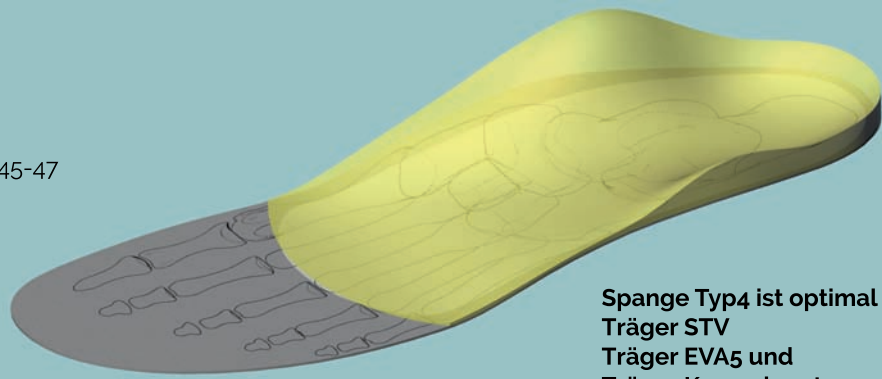

**Spange Typ4 ist optimal für
Träger STV
Träger EVA5 und
Träger K7 geeignet.**

SensoSpange-Elemente

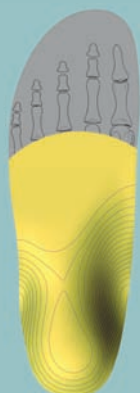

Spange Typ5 (konvex)


erhältlich in den Größen

36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

Stabilisierung und
Aufrichtung des
Rückfußes;
ideal bei Knickfuß



**Spange Typ5 ist optimal für
Träger PF
Träger PFV und
Träger SToV geeignet.**

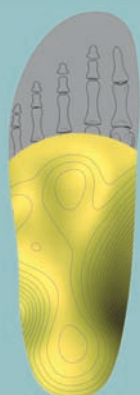


Spange Typ6 (konkav)


erhältlich in den Größen

36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

für alle Schuhe
mit wenig Platz;
optimale
Stabilisierungsschlinge
zwischen Peronäus
Longus und Tibialis
Posterior (Steigbügelleffekt);
idealer Umknickschutz

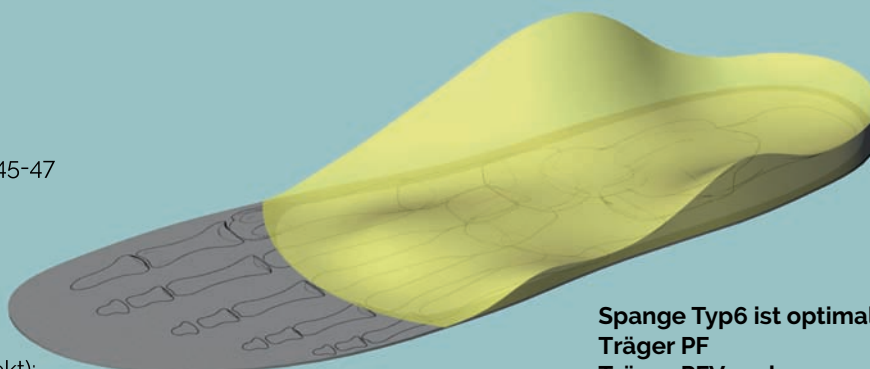

**Spange Typ6 ist optimal für
Träger PF
Träger PFV und
Träger SToV geeignet.**

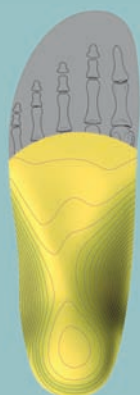


Spange Typ7 (konkav)

erhältlich in den Größen

36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

ideale Fersenklammer zur
Stabilisierung bei
Achillodynie und
für Hohlfuß geeignet;
mit langezogener
Peronäusstabilisierung

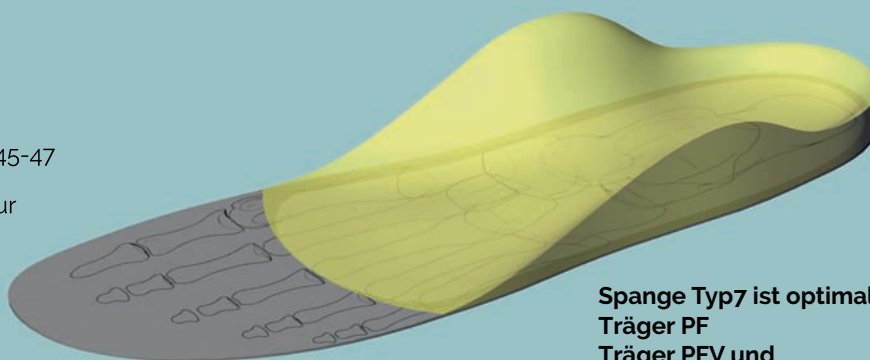

**Spange Typ7 ist optimal für
Träger PF
Träger PFV und
Träger SToV geeignet.**




Spange Typ8 (konkav)

erhältlich in den Größen

36-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

ideale Fersenklammer zur
Stabilisierung bei
Achillodynie und
für Hohlfuß geeignet;
mit langezogener
Peronäusstabilisierung

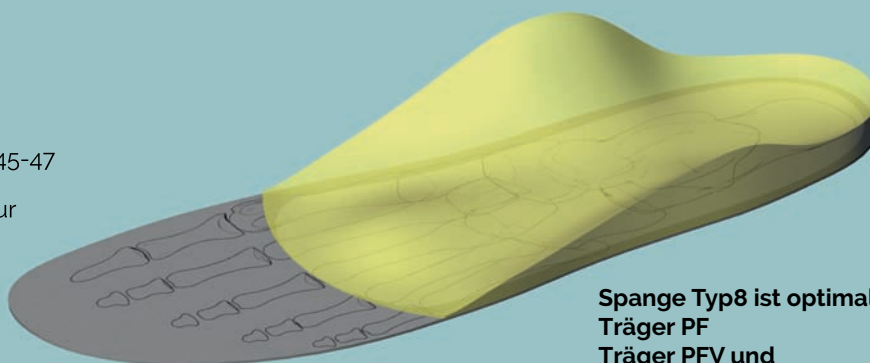

**Spange Typ8 ist optimal für
Träger PF
Träger PFV und
Träger SToV geeignet.**



SensoSpange – Der Schlüssel zur Versorgung

Ein Sprichwort sagt: Wer den Rückfuß beherrscht, hat das Fußproblem gelöst.

Aber das ist noch nicht alles: Die Rückfuß-Regulierung ist das Fundament für eine gesunde Körperstatik.

Ohne Rückfußregulierung macht auch die restliche Einlagenversorgung keinen Sinn.
Deshalb sind die SensoSpange-Elemente mit die wichtigsten Teile des SensoMatch-Systems.

- Das Material der SensoSpange ist ein spezielles physiodynamisches PU mit extrem hoher Rückstellfähigkeit.
- Durch die Aufrichtung des Fersenbeines wird die Achillessehne ins perfekte Lot gebracht.
- Die Stabilisierung des Rückfußes bewirkt einen Ausgleich des Steigbügelmuskels in Länge und Tonus.
- Die Rückfußregulierung löst eine Neuordnung des gesamten Fußskelettes aus.
- In Kombination mit Mittelfuß- und Vorfußelementen wird der Fuß zunächst skelettär, dann muskulär und schließlich biomechanisch ins gesunde Lot korrigiert.
- Das physiodynamische Spezialmaterial der SensoSpange fixiert die korrekte Fußstellung dauerhaft.
- Die Ausrichtung der Basis Fuß führt zu einer Neuordnung der Körperstatik und gesunder Gelenksbiomechanik.
- Die Stabilisierung des Rückfußes schützt zusätzlich effektiv vor Umknicken beim Sport und in höheren Schuhen.

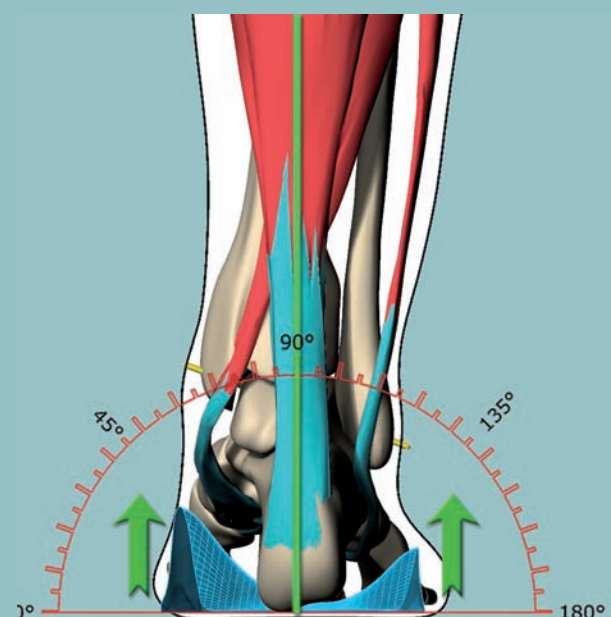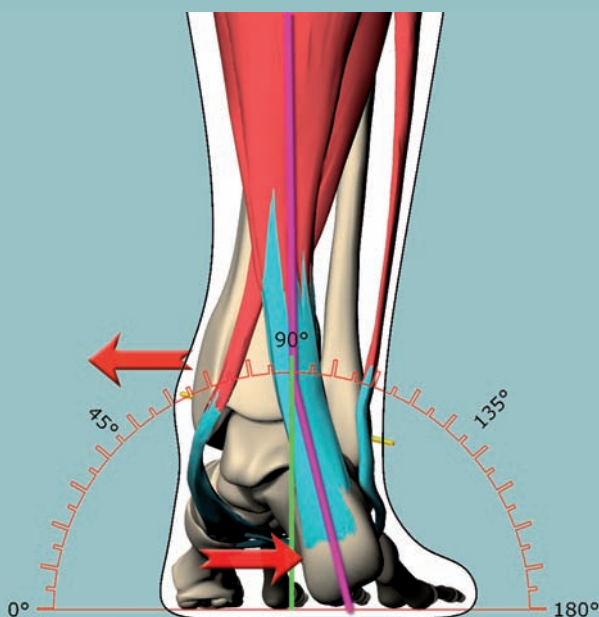

Die optimale Umknick-Prophylaxe


Umknicken ist eine der häufigsten Verletzungsrisiken – nicht nur im Sport.
Mit der SensoSpange lässt sich das Risiko in jeder Schuhform perfekt minimieren.

- Die SensoSpange steht für optimale Gangsicherheit.
- Sie kann individuell auf Maß angepasst, medial abgesenkt oder lateral erhöht werden
- Die Spange ist als Einzelelement minimalisiert und wirkt nur da, wo sie gebraucht wird.
- Die Ferse liegt bei Bedarf auf der Brandsohle auf.



Die spezielle Steigbügelwirkung der SensoMatch-Spange:

- Das Fersenbein und die Achillessehne werden ins optimale Lot gebracht.
- Peronäus Longus und Tibialis Posterior werden in Länge und Tonus ausgeglichen.
- Sowohl im Pump als auch im Turnschuh verhindert die Spange das Umknicken.
– **Sie ist daher die optimale Prävention für die Gelenksgesundheit!**
- Speziell beim Sport senkt die Spange das Verletzungsrisiko und erhöht die Leistungsfähigkeit im Training!

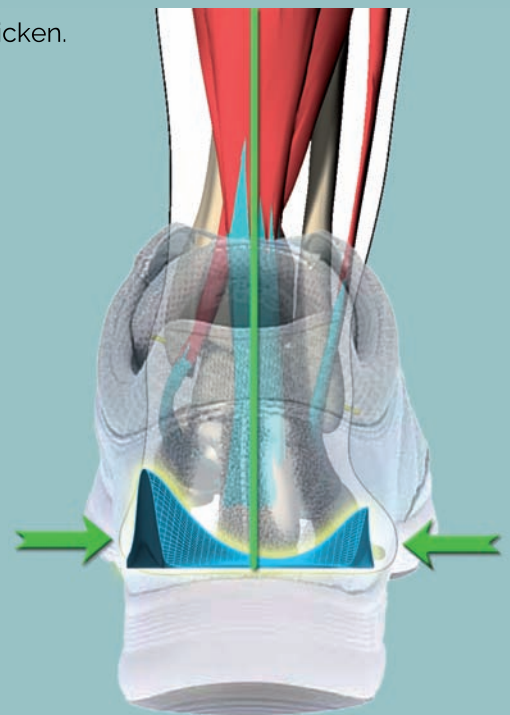

SensoMatch weiß, was Frauenfüße wollen

Das große Problem bei hochhackigen Pumps ist der enorme Druck, der auf den Vorfuß wirkt. Standardpolster aus dem Geschäft passen nicht genau in den Schuh und verlieren in kürzester Zeit Ihre Wirkung.

Die SensoMatch Schmetterlingsrolle ...

- ... ist die individuell angepasste Lösung für die Lieblings-High-Heels Ihrer Kundinnen.
- ... lässt sich mit wenigen Handgriffen genau in den Schuh und an den Fuß anpassen.
- ... entlastet mit ihrer Pelotte den Vorfuß und die Zehen spürbar.
- ... verliert dank ihres physiodynamischen Spezialmaterials auch in sehr dünner Ausführung nicht Ihre Wirksamkeit.



Einfach genialer EinlagenComfort

Mit dem SensoMatch-System wird der Schuh selbst zur Einlage! Damit machen Sie ein herkömmliches Markenprodukt aus Ihrem Verkaufssortiment zu einem individuellen Einlagenprodukt aus Ihrer Werkstatt.

Am besten lässt sich das an dem Klassiker FinnComfort zeigen:

- Direktes Aufkleben aller SensoMatch-Elemente auf das FinnComfort Originalfußbett
- Beste Haftungseigenschaften dank Spezialmaterial
- Volle sensomotorische Wirkung ohne Trägersystem
- Null Platzverlust im Schuh
- Schneller Einbau und einfache Nachbearbeitung
- Ideale Individualisierung eines hochwertigen Markenbequemschuhs




DGUV 112 - 191: Zertifizierungen inklusive

So einfach wie möglich, aber ohne Kompromisse bei der Qualität.

Das gilt im SensoMatch-System auch für die sensomotorische Versorgung von Arbeitssicherheits- und Berufsschuhen. Die SensoMatch-Elemente sind aus physiodynamischem Spezial-PU. Das bedeutet:

- Die SensoMatch-Einlage mit entsprechendem Bezug ist zertifiziert für die meisten Sicherheitsschuhmodelle von Elten, Steitz Secura und Atlas.
- Die ESD-Leitfähigkeit ist gegeben.
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme sorgt für ein angenehmes Fußklima.

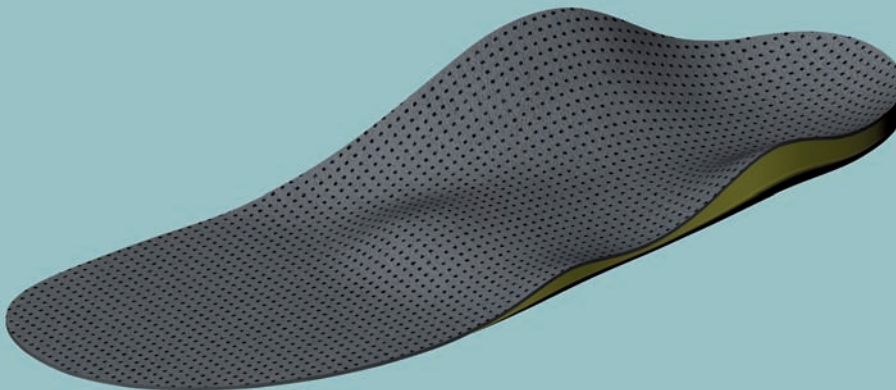


Knick-Senk-Plattfuß

Wirkungsprinzip:


- Aufrichtung unter dem Fersenbeinbalkon
- Aktivierung der Schienbeinmuskulatur
- Stabilisierung des Fußaußenrandes durch Peronaeus-Bar
- Verstärkte Aktivierung der Wadenbeinmuskulatur
- Förderung der spiraldynamischen Verschraubung
- Entlastung Mittelfußknochen 2-5
- Flächigerer Bodenkontakt der Zehen
- Verbesserte Koordination und Wahrnehmung



- **Aktivierung des hinteren Schienbeinmuskels (Tibialis posterior) zur Aufrichtung des Längsgewölbes**
- **Aufdrehung des Fersenbeins Calcaneus durch gleichzeitige Dehnung der äußeren Peronäus-Muskulatur**

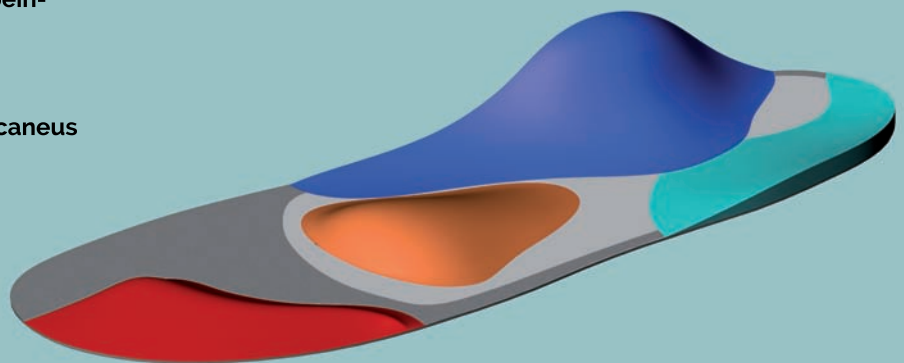

So versorgen Sie mit SensoMatch

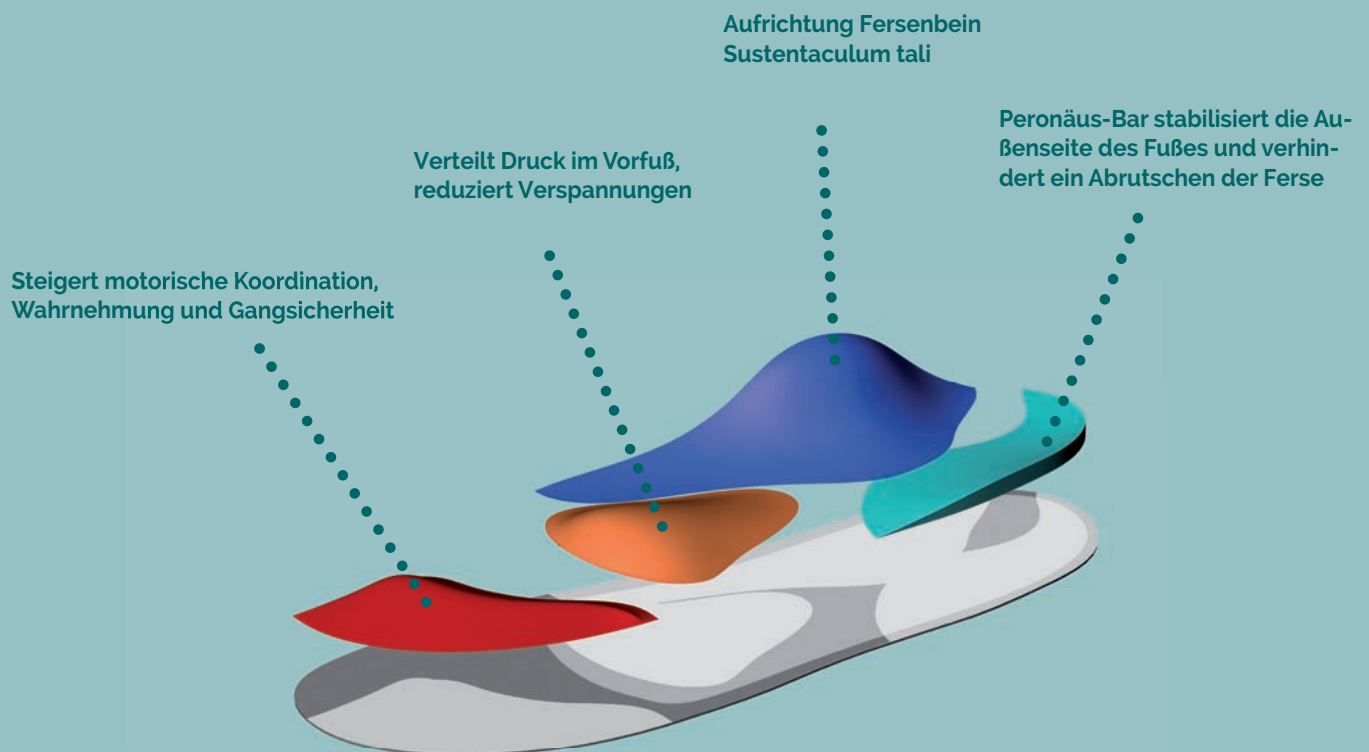


Hohlfuß

Wirkungsprinzip:

- Dehnung Fersenbein nach hinten
- Streckung des Vorfußes
- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Varus- oder Valguskorrektur durch Fersenklammer
- Aktivierung des langen Wadenbeinmuskels (Peroneus longus)
- Stabilisierung des Fußaußenrandes durch Peroneus-Bar mit Außenstufe
- Verstärkte Tonusminderung der Wadenbeinmuskulatur
- Entlastung Mittelfußknochen 2-5
- Flächigerer Bodenkontakt der Zehen
- Verbesserte Koordination und Wahrnehmung



- Aktivierung des langen Wadenbeinmuskels (Peroneus longus)
- Verhindern von Abknicken nach außen
- Stabilisierung des Sprunggelenks

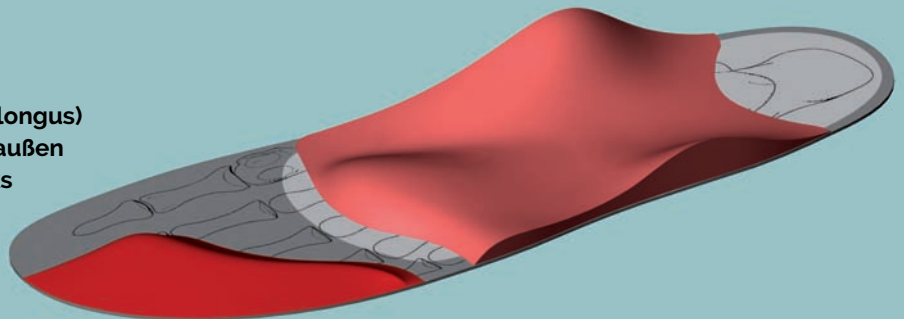

So versorgen Sie mit SensoMatch


Spannungsreduzierung in der Wadenmuskulatur und Achillessehne
Steigerung der motorischen Koordination, Wahrnehmung und Gangsicherheit

Querbrücke streckt den Fuß und dehnt die verkürzte Plantarfaszie

Stufe medial und lateral dient der Aufdehnung der Plantarfaszie und verkürzt die Fußsohlenmuskulatur

Schale sehr flach ermöglicht eine Verschiebung des zu steil stehenden Fersenbeins nach hinten

Aktivierung der Peroneusmuskulatur durch Außenstütze

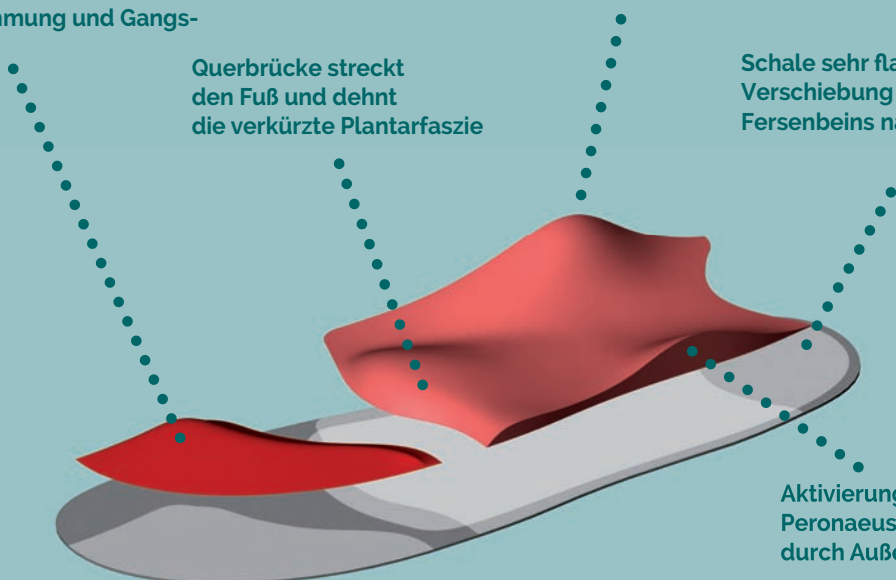


Hohl-Knickfuß

Wirkungsprinzip:

- Dehnung Fersenbein nach hinten
- Streckung des Vorfußes
- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Varus- oder Valguskorrektur durch Fersenklammer
- Aktivierung des langen Wadenbeinmuskels (Peroneus longus)
- Stabilisierung des Fußaußenrandes durch Peroneus-Bar mit Außenstufe
- Verstärkte Tonusminderung der Wadenbeinmuskulatur
- Entlastung Mittelfußknochen 2-5
- Flächigerer Bodenkontakt der Zehen
- Verbesserte Koordination und Wahrnehmung



- Aktivierung des langen Wadenbeinmuskels (Peroneus longus)
- Verhindern von Abknicken nach außen
- Stabilisierung des Sprunggelenks

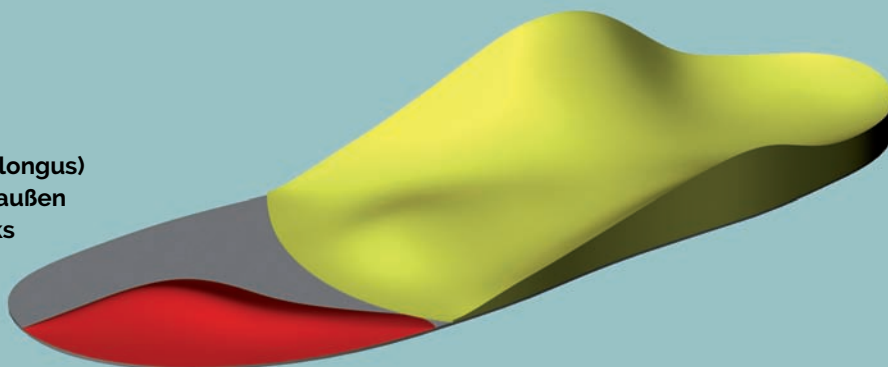

So versorgen Sie mit SensoMatch


Spannungsreduzierung in der Wadenmuskulatur und Achillessehne
Steigerung der motorischen Koordination, Wahrnehmung und Gangsicherheit

Hohes Längsgewölbe, um Stabilität und Ruhigstellung der Standunsicherheit zu erzielen

Querbrücke streckt den Fuß und dehnt die verkürzte Plantarfaszie

Leichte Fersenschale für Stabilisierung des Rückfußes


Aktivierung der Peroneusmuskulatur durch Außenstütze

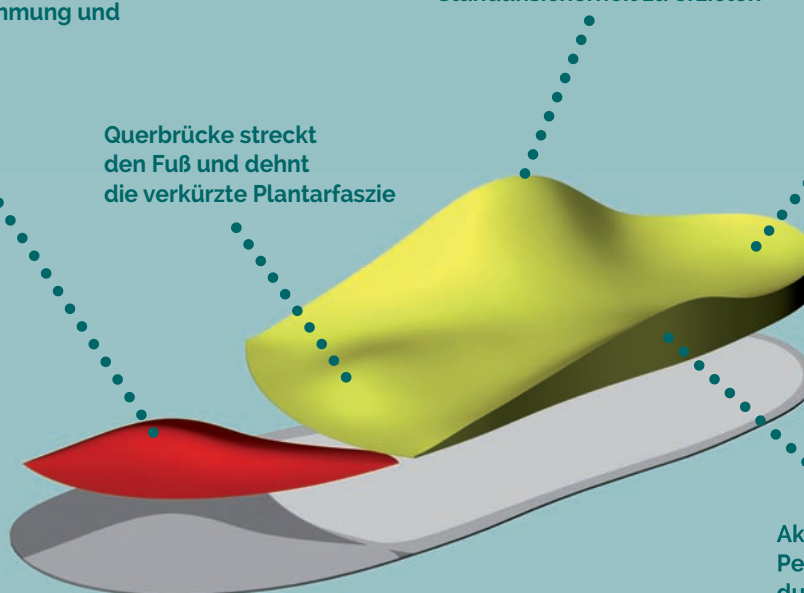

Spreizfuß

Wirkungsprinzip:

- Hohe Pelotte zur Entlastung der Köpfchen 2-4
- Schmerzreduktion durch Tieferlegung der MK 2-4
- Stabilisierung des Sprunggelenks durch Fersenklammer durch die XX-Achse
- Kontrolle des Vorfußes durch Zehensteg
- Verbesserte Koordination und Wahrnehmung

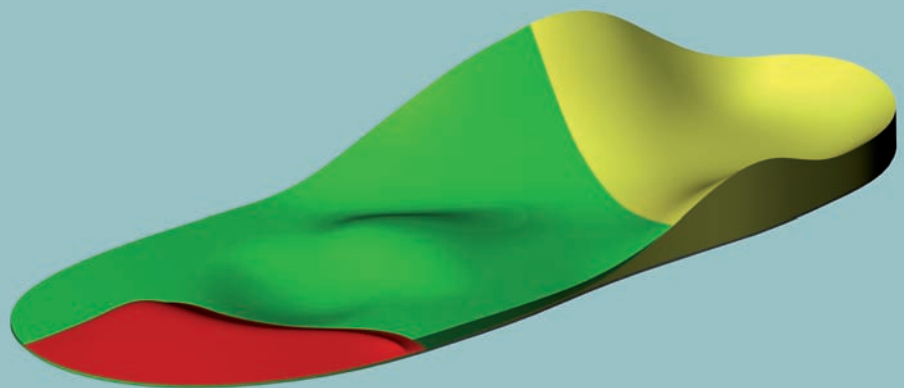


So versorgen Sie mit SensoMatch

Streckt Zehen durch bei Kral-
lenzahnbildung, steigert
motorische Koordination, Wahr-
nehmung und Gangsicherheit

Pelotte reduziert Vorfußdruck
und hebt Mk 2-4

Aktivierung Tibialis posterior
unter Sustentaculum tali

Fersenklammer in XX Achse mit
Steigbügeleffekt sichert Sprunggelenk
und gibt Rückfußsicherheit

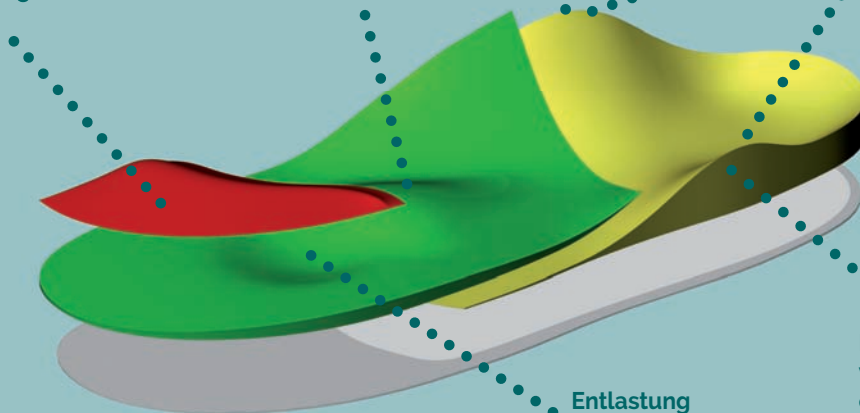


Entlastung
MK 2-4

Peroneusstütze
verhindert Umkni-
cken nach außen
und Abrutschen
der Ferse



Hallux Valgus und Hallux Rigidus

Wirkungsprinzip:


- Durch Halluxstufe dehnen des M. Extensor und Flexor hallucis longus
- Stufe entlastet Druck am Innenballen
- Hohe Pelotte zur Entlastung der Köpfchen 2-4
- Stabilisierung des Sprunggelenks durch Fersenklammer durch die XX Achse
- Kontrolle des Vorfußes durch Zehensteg
- Verbesserte Koordination und Wahrnehmung

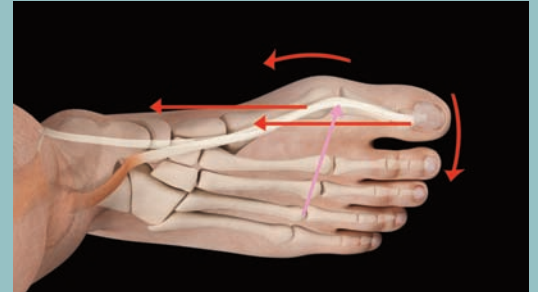

HALLUX VALGUS

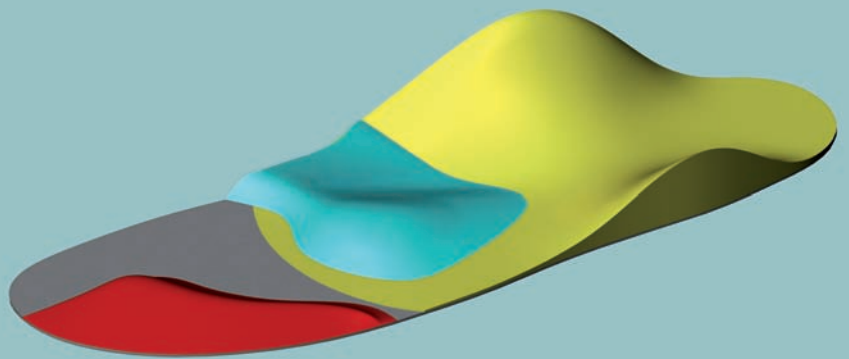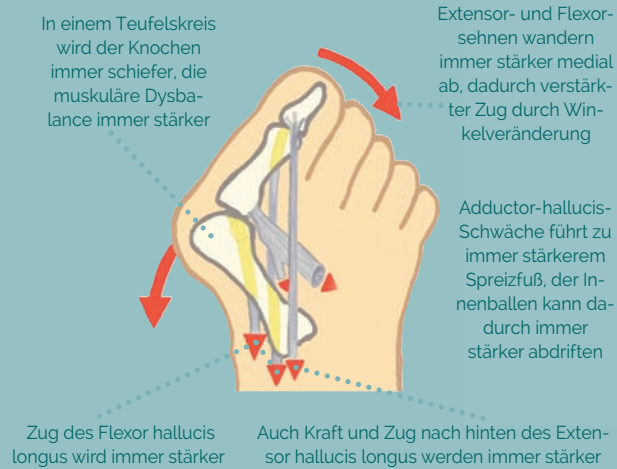


So versorgen Sie mit SensoMatch

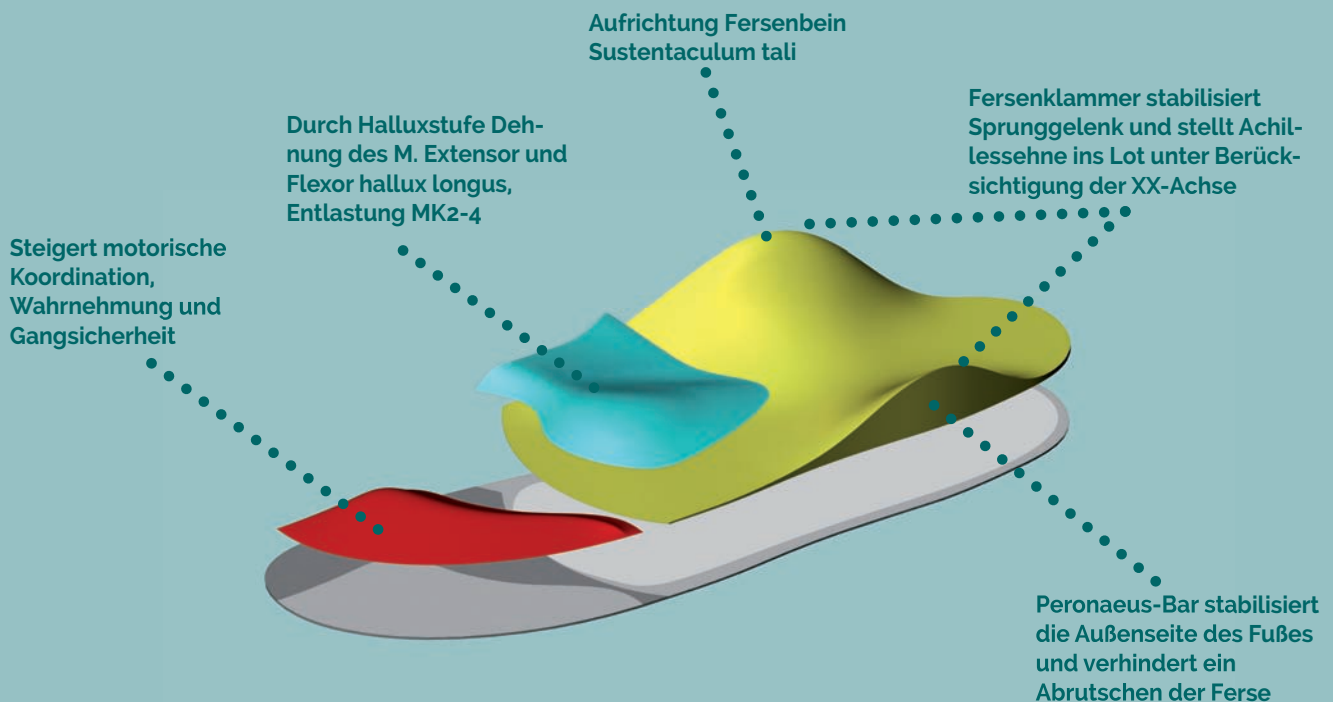


Achillodynie

Wirkungsprinzip:

- Aufrichtung unter dem Fersenbeinbalkon
- Aktivierung der Schienbeinmuskulatur
- Stabilisierung des Fußaußenrandes durch Peroneus-Bar
- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Ruhigstellung durch Fersenklammer sehr wichtig
- Starker Zehensteg zur Entspannung der Wadenmuskulatur
- Flächigerer Bodenkontakt der Zehen
- Verbesserte Koordination und Wahrnehmung

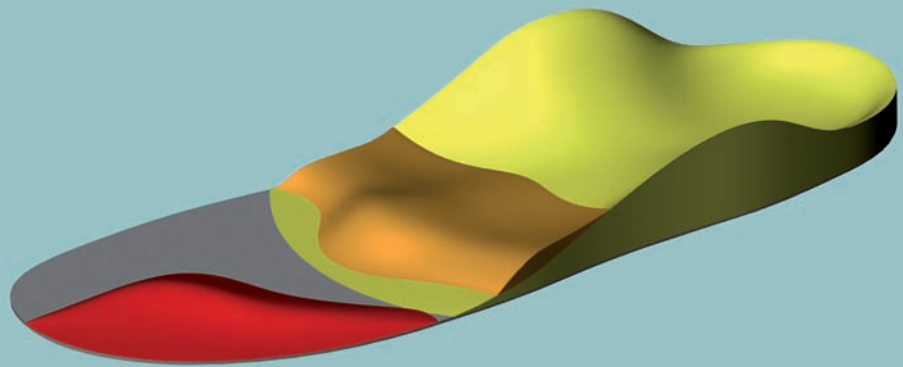

So versorgen Sie mit SensoMatch

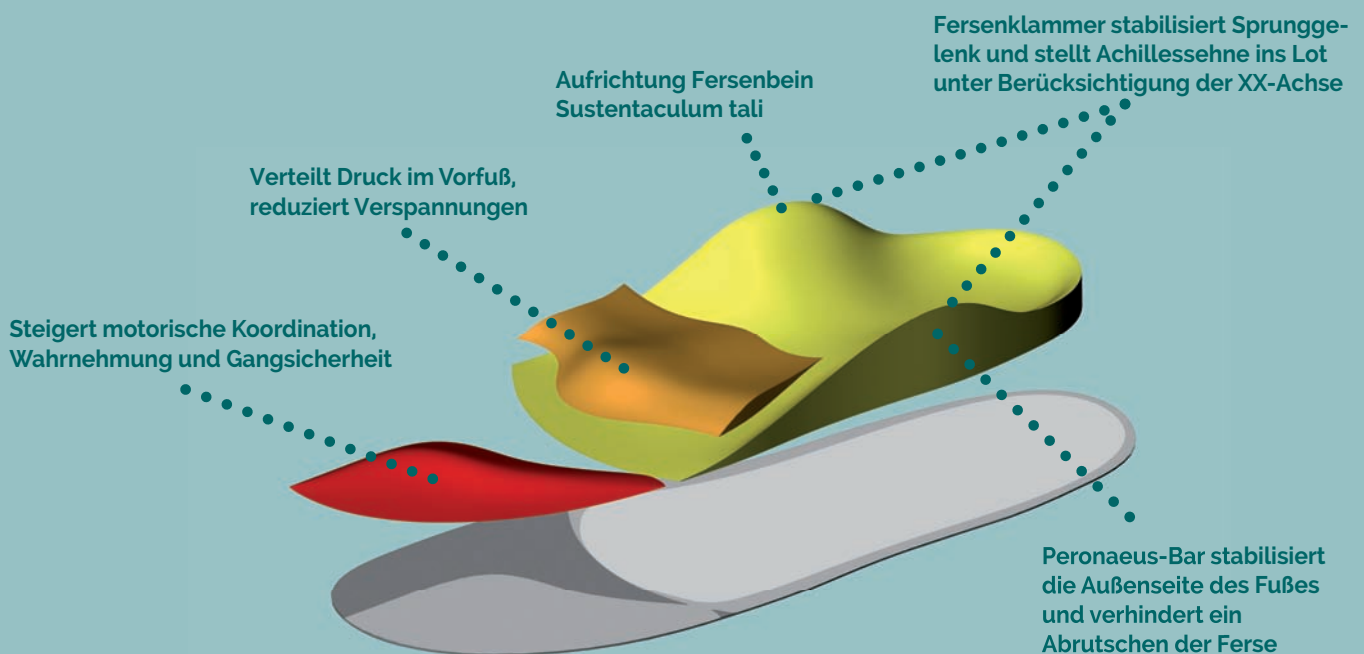


Fersensporn

Wirkungsprinzip:

- Aufrichtung unter dem Fersenbeinbalkon
- Aktivierung der Schienbeinmuskulatur
- Stabilisierung des Fußaußenrandes durch Peronaeus-Bar
- Stabilisierung des Sprunggelenks
- Lochaussparung an betroffener Stelle
- Fersenweichbettung durch Dämpfungseigenschaften
- Flächigerer Bodenkontakt der Zehen
- Verbesserte Koordination und Wahrnehmung



- Tibialis-posterior-Schwäche führt zu Knickfuß und einseitig punktueller Belastung des Fersenbeins

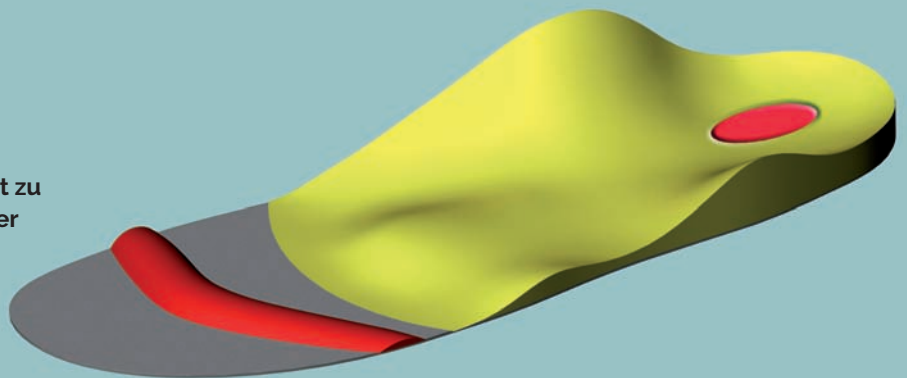

So versorgen Sie mit SensoMatch

Steigert motorische Koordination, Wahrnehmung und Gangsicherheit


Freilegen der Schmerzstelle an der Ferse

Verteilt Druck im Vorfuß, reduziert Verspannungen

Aufrichtung Fersenbein
Sustentaculum tali



Fersenklammer stabilisiert Sprunggelenk und stellt Achillessehne ins Lot unter Berücksichtigung der XX-Achse

Peronaeus-Bar stabilisiert die Außenseite des Fußes und verhindert ein Abrutschen der Ferse

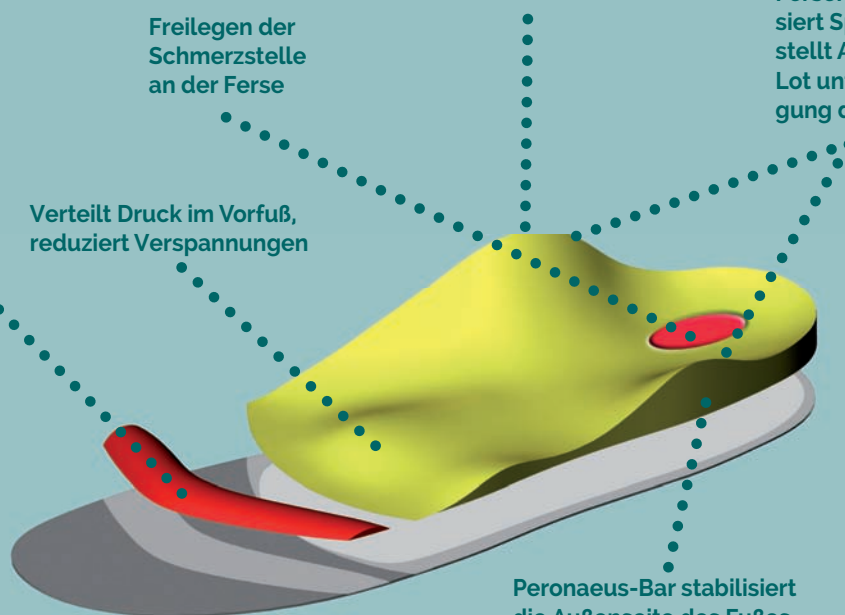




Versorgungsvielfalt erleben

Die Kombinationsmöglichkeiten von SensoMatch sind fast unbegrenzt. Einige Impressionen:

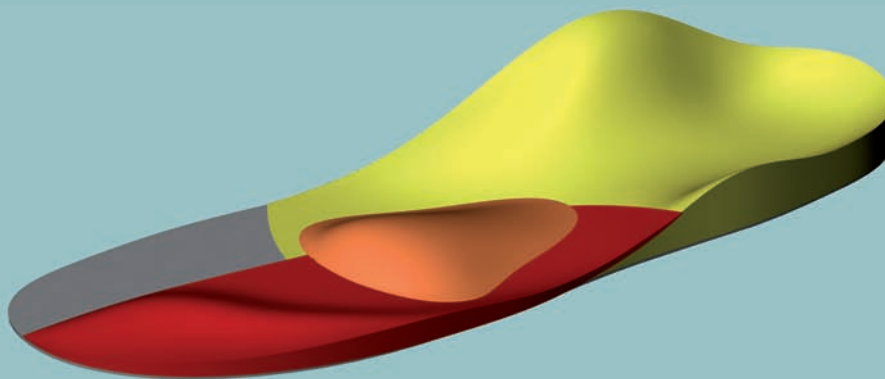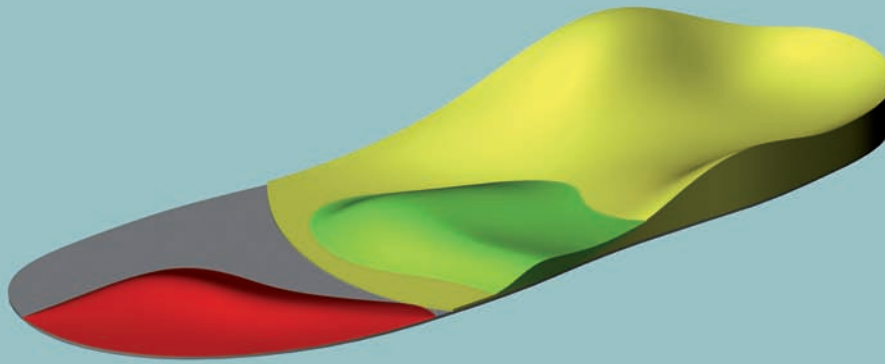




VersorgungsVielfalt erleben

Die Kombinationsmöglichkeiten von SensoMatch sind fast unbegrenzt. Einige Impressionen:

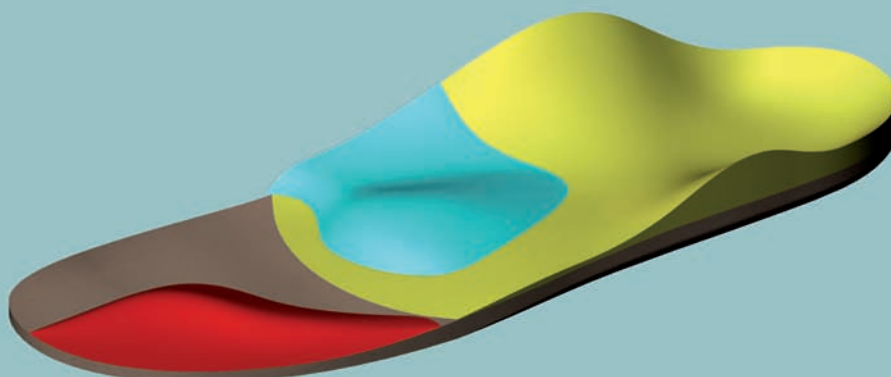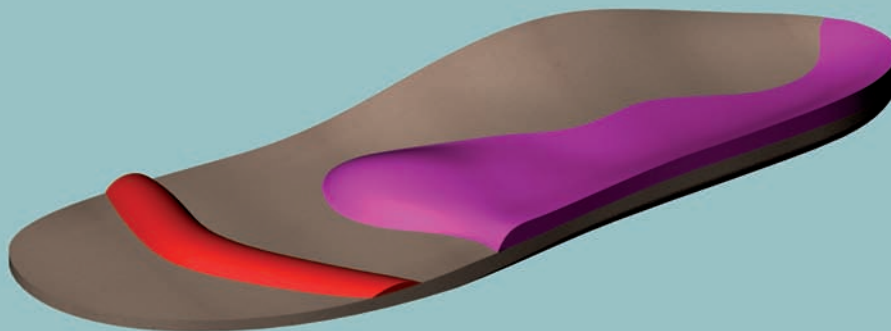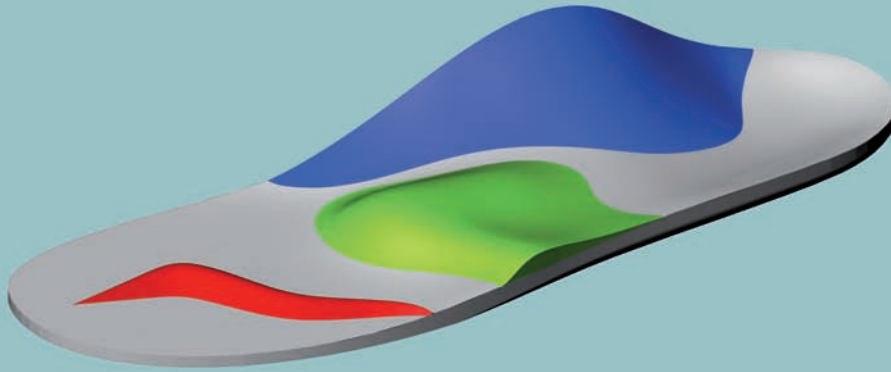




Versorgungsvielfalt erleben

Die Kombinationsmöglichkeiten von SensoMatch sind fast unbegrenzt. Einige Impressionen:

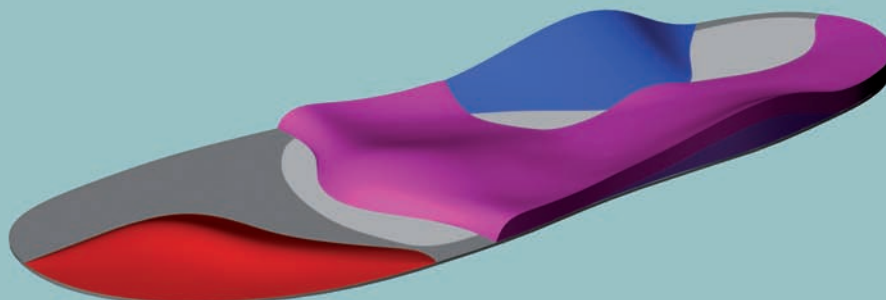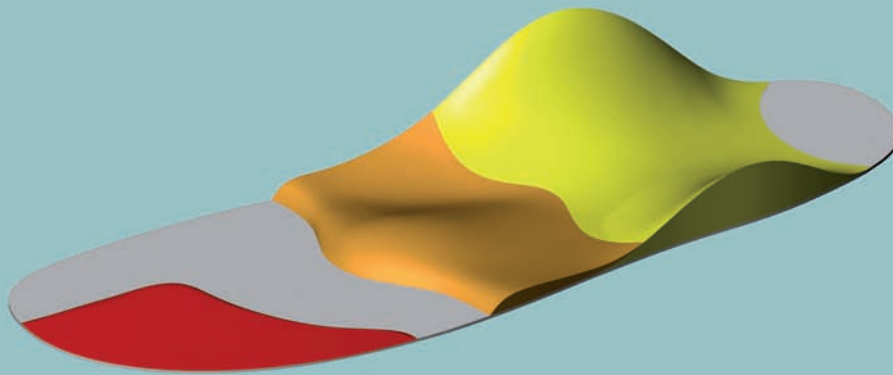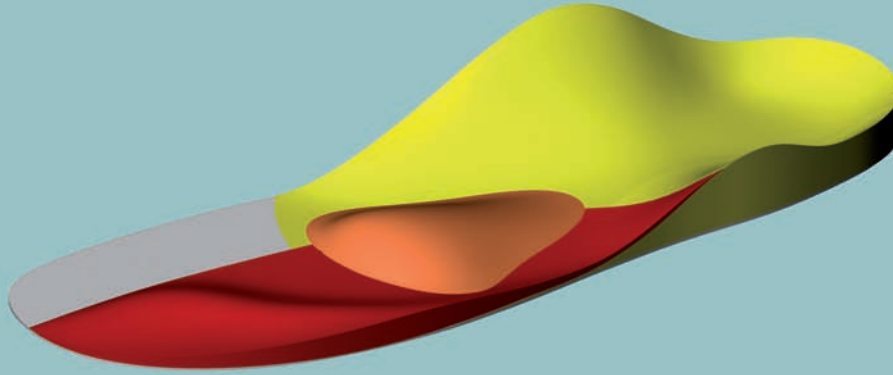

Versorgungsvielfalt erleben

Die Kombinationsmöglichkeiten von SensoMatch sind fast unbegrenzt. Einige Impressionen:

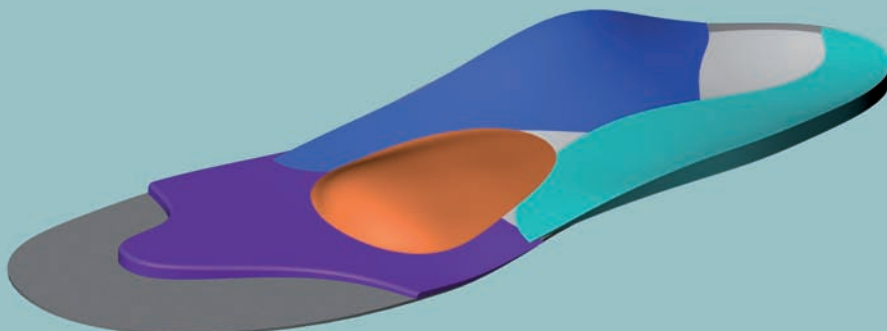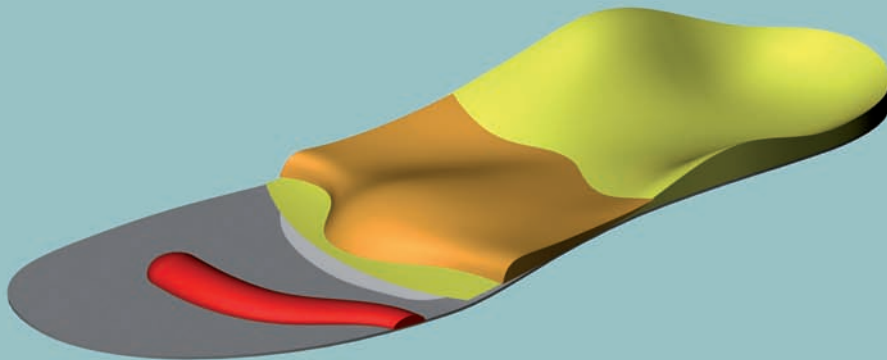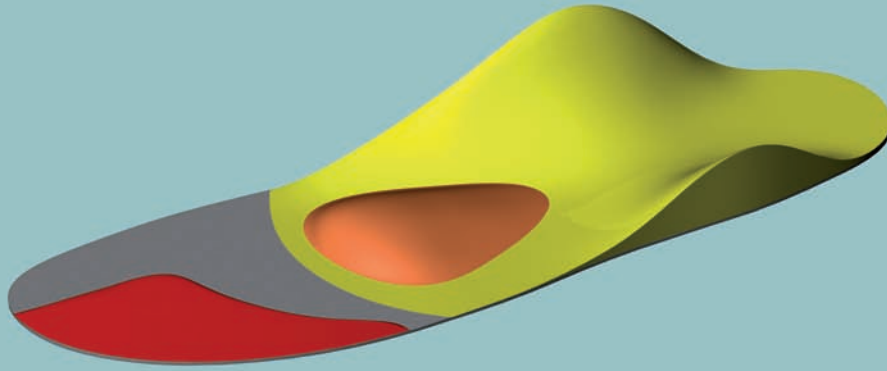



Franz Seidl GmbH
Orthopädie-Schuhtechnik
Roritzer Straße 4
93047 Regensburg
Telefon: 0941 51598
Telefax: 0941 5999741
eMail: info@schuh-seidl.de

