


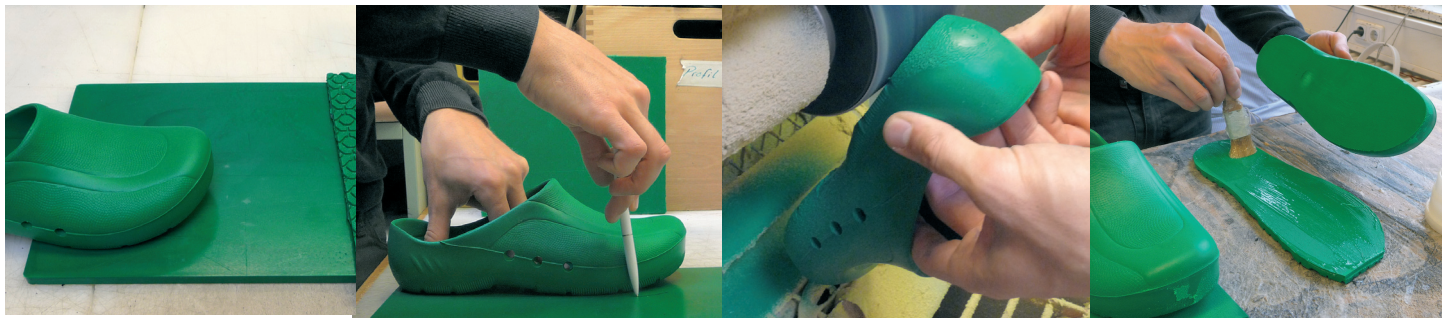

Fertigungsanweisung Zurichtung OrthoClogs

Der OrthoClog ist eine Weiterentwicklung der Firma Schürr Profi Shoes. OrthoClogs sind anti-statisch, haben eine rutschhemmende Sohle und bieten ein sehr gutes Fußklima. Dank ihres strapazierfähigen PU-Materials sind sie bei 70 Grad waschbar und leicht zu desinfizieren. Der OrthoClog kann durch orthopädische Zurichtung den individuellen Bedürfnissen jedes Mitarbeiters angepasst werden und ist ideal kombinierbar mit der waschbaren Einlage Sensoped.

Der komplette Bausatz für den OrthoClog ist bei der Firma Seidl erhältlich! Tel. 0941 51598

Material: 1 Zentimeter starke, farblich abgestimmte PU-Platten mit und ohne Profil

Zurichtungsmöglichkeiten:

Bis zu 3 Zentimeter Verkürzung

Schuhaußenranderrhöhung

Ballenrolle etc.



Verarbeitungsanweisung:

1. Richtige Größe wählen.
2. Sohlenmaterial anzeichnen und ausschneiden.
3. Schuh und Sohle aufschleifen und mit einer Mischung aus wasserfestem Kleber und Vernetzer einstreichen. Dem Klebstoff müssen zwischen fünf, höchstens jedoch zehn Prozent Vernetzer beigemischt werden, um die Waschbarkeit zu gewährleisten. Vernetzer und Kleber sind bei der Firma Seidl erhältlich. Zehn Minuten ablüften lassen.
4. Abgelüfteten Schuh plus Sohle zwischen drei und fünf Minuten mit Aktiviergerät aktivieren.
5. Beide Flächen verkleben.
6. Beides für einige Minuten in die Presse stellen.
7. Überstehendes Sohlenmaterial abschneiden, glatt schleifen.



GmbH Orthopädie - Schuhtechnik

Roritzerstraße 4
93047 Regensburg
Telefon: 0941/51598
Fax: 0941/5999741
eMail: info@sensoped.de